

Data: 14 giugno 2021

Distribuzione: Interna/esterna

Prodotto: CS Connect 4.5

Autrice: Marianne Belcari

N° di riferimento del documento: PN 00508

Rivolgersi a: marianne.belcari@csdental.com

Validità: Globale

CS Connect v4.5

La piattaforma di collaborazione ideale per la condivisione della scansione intraorale con i propri partner


Carestream Dental è lieta di presentare CS Connect v4.5, che fornisce a dentisti, laboratori odontotecnici e partner i seguenti miglioramenti basati sul web:

- **CS WebViewer** più completo per migliorare la collaborazione e la revisione dei casi
- Miglioramento dell'ecosistema e dell'abbinamento con i **partner Quick Connect**


CS WebViewer più completo

CS WebViewer, basato sulla piattaforma cloud, consente al laboratorio di visualizzare la linea di margine 3D a colori ad alta definizione in tempo reale, migliorando la comunicazione con il clinico senza la necessità di installare software aggiuntivi.

Per rivedere le scansioni che sono state trasferite al laboratorio con CS Web Viewer, basta che l'utente faccia clic sull'**icona** dell'anteprima del caso nella piattaforma CS Connect.

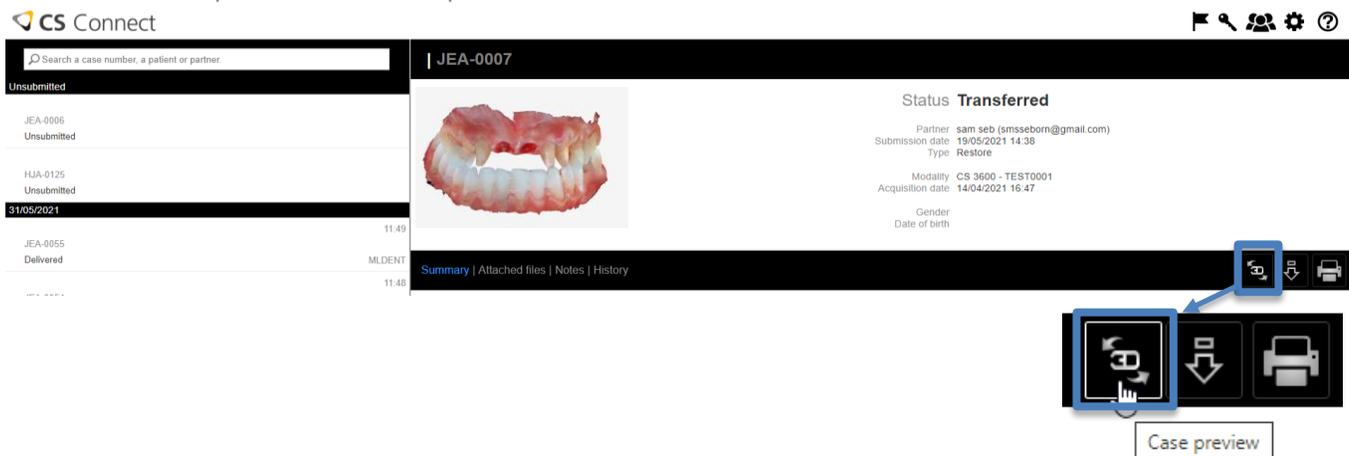

The screenshot displays the CS Connect web interface. At the top, there is a search bar and navigation icons. The main content area shows a list of cases on the left, a 3D model of a dental arch in the center, and a status panel on the right. The status panel indicates the case is 'Transferred' and provides details such as the partner name, submission date, and acquisition date. A blue box highlights the 'Case preview' icon in the bottom right corner of the interface.


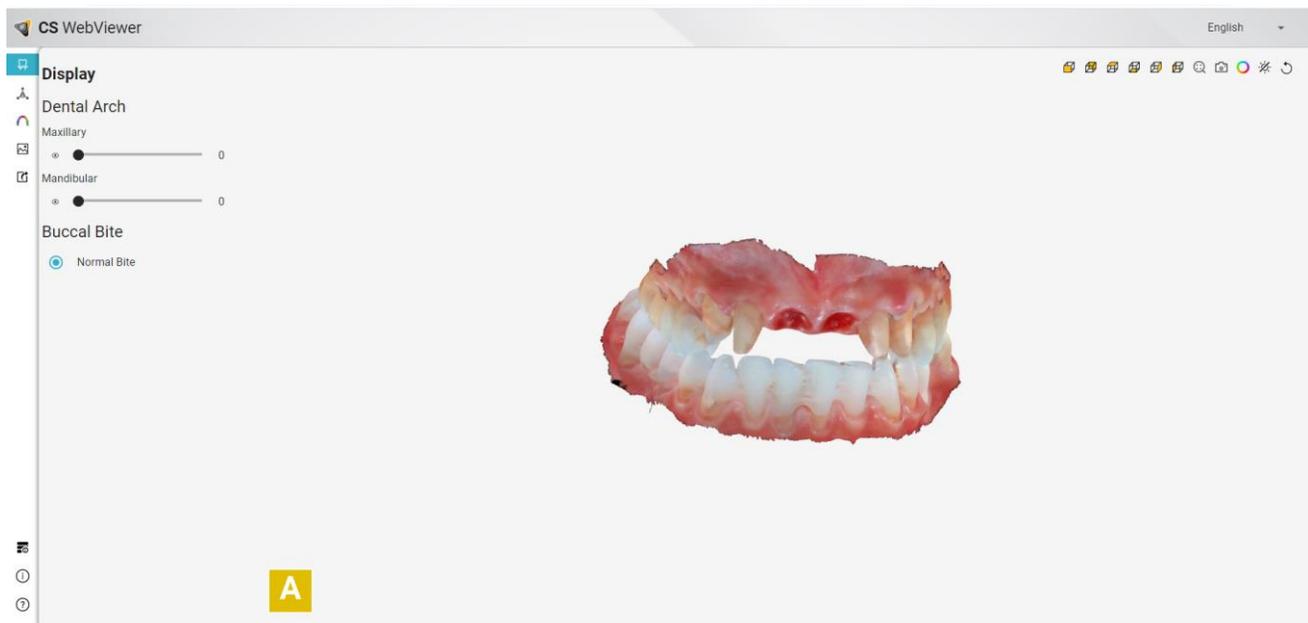




Il nuovo sfondo bianco e i miglioramenti del display consentono sia ai dentisti che ai laboratori di visualizzare immagini 3D ad alta definizione vivide con CS WebViewer. I file DICOM offrono una qualità dell'immagine eccezionale con colori e dettagli più nitidi.

La barra degli strumenti è stata riorganizzata sul lato sinistro dello schermo per massimizzare le opzioni degli strumenti disponibili:

Icona	Strumento
	Visualizzazione
	Regolazione orientamento
	Prossimità occlusale
	Galleria
	Esportazione

Tab Display

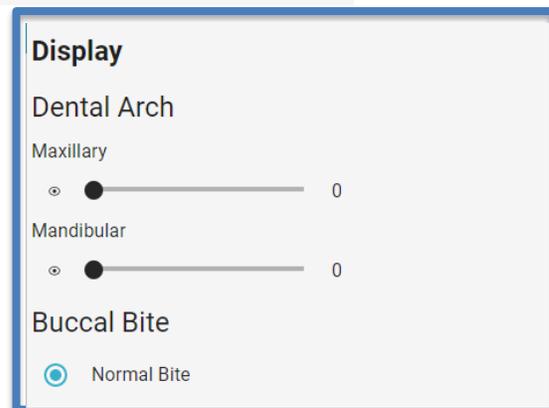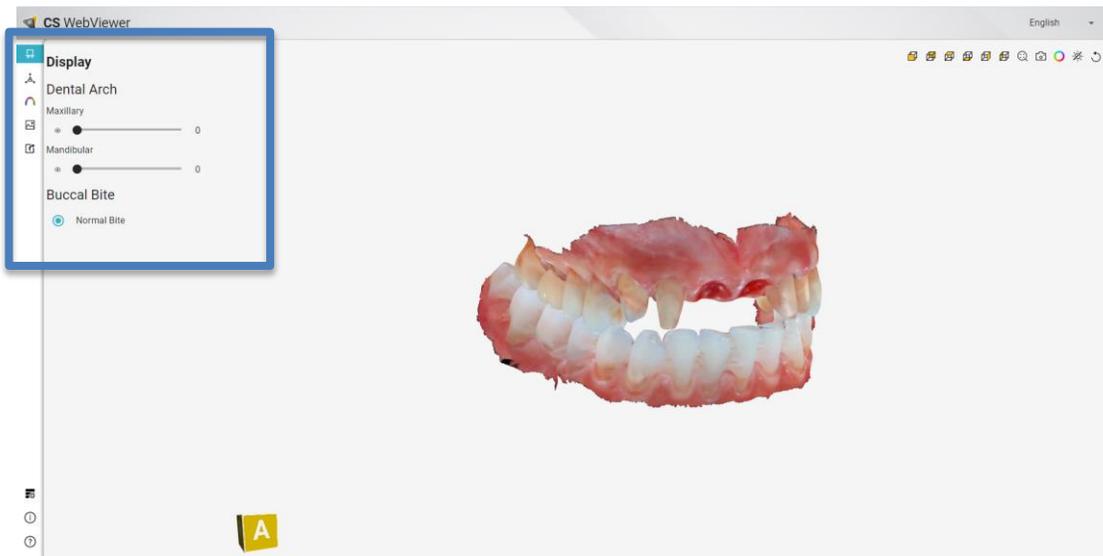

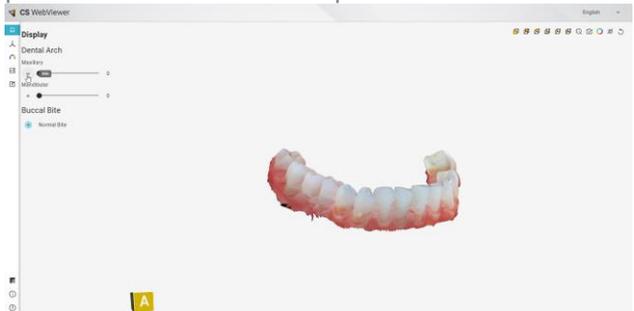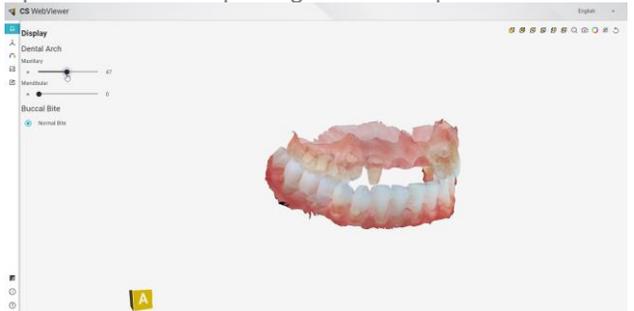Icona	Strumento
	<p>Premere il pulsante con l'occhio per mostrare/nascondere l'impressione</p> 
<p>Maxillary</p> 	<p>Spostare il cursore per regolare la trasparenza</p> 



Sono stati aggiunti tre importanti strumenti a CS WebViewer:

- Strumenti di regolazione dell'orientamento ed esportazione del modello 3D regolato
- Strumenti di acquisizione ed esportazione delle istantanee
- Strumento di prossimità oclusale

Gli **strumenti di regolazione dell'orientamento** permettono di adattare il modello 3D sugli angoli X, Y e Z prima di esportarlo nel software CAM.




Una volta regolato, il modello si può salvare in formato STL o PLY dalla scheda di esportazione. In alternativa, l'utente può selezionare i parametri preimpostati dal suo software CAD preferito.

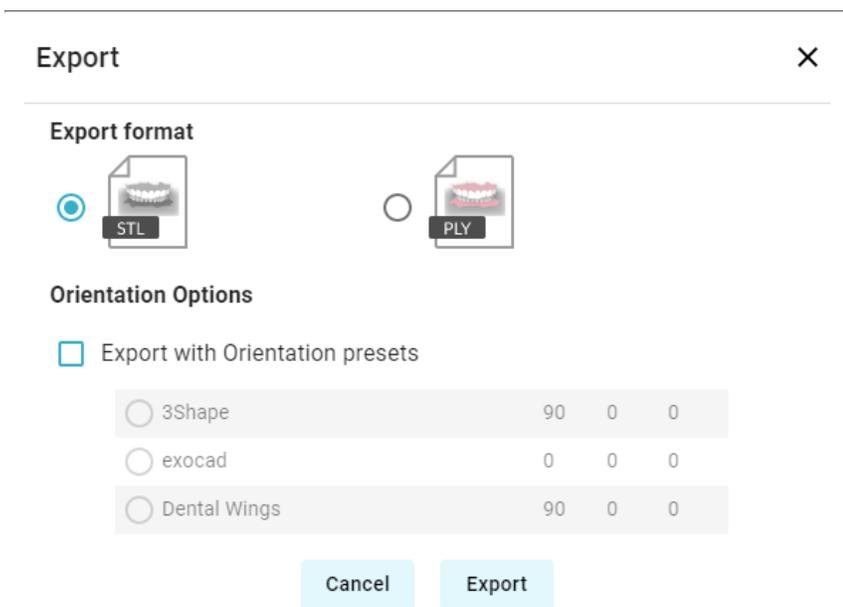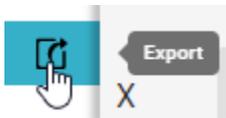


Strumenti di acquisizione ed esportazione delle istantanee

L'icona con la fotocamera nell'angolo in alto a destra di CS WebViewer consente agli utenti di eseguire qualsiasi tipo di acquisizione 2D.

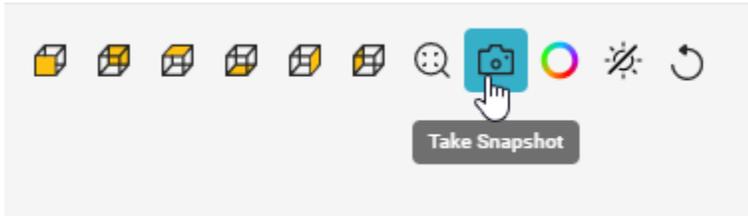


È possibile selezionare la visualizzazione di una particolare scansione e premere l'icona "Scatta istantanea", che genererà automaticamente lo screenshot e lo salverà nella sezione Galleria:

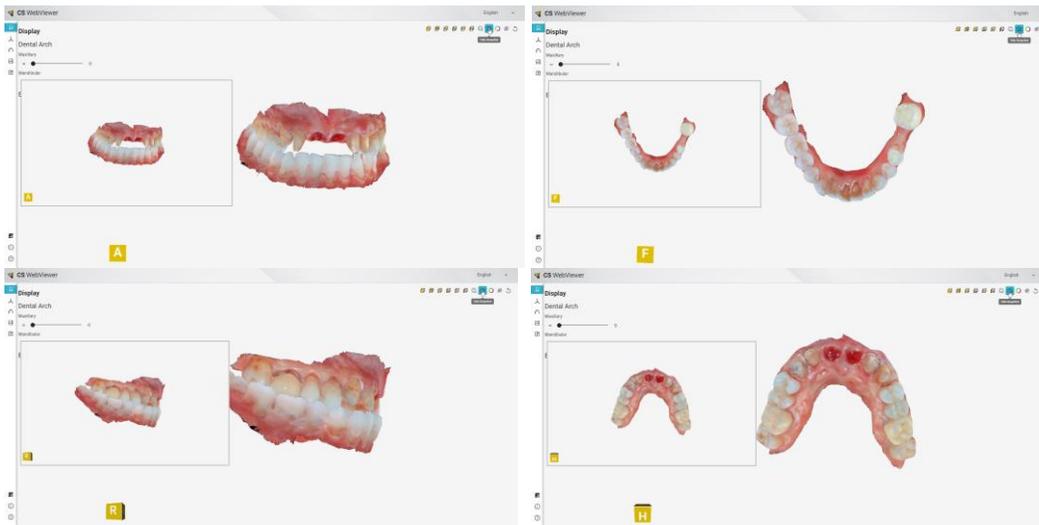


Acquisizione delle istantanee


Tutte le immagini acquisite vengono archiviate nella sezione Galleria:

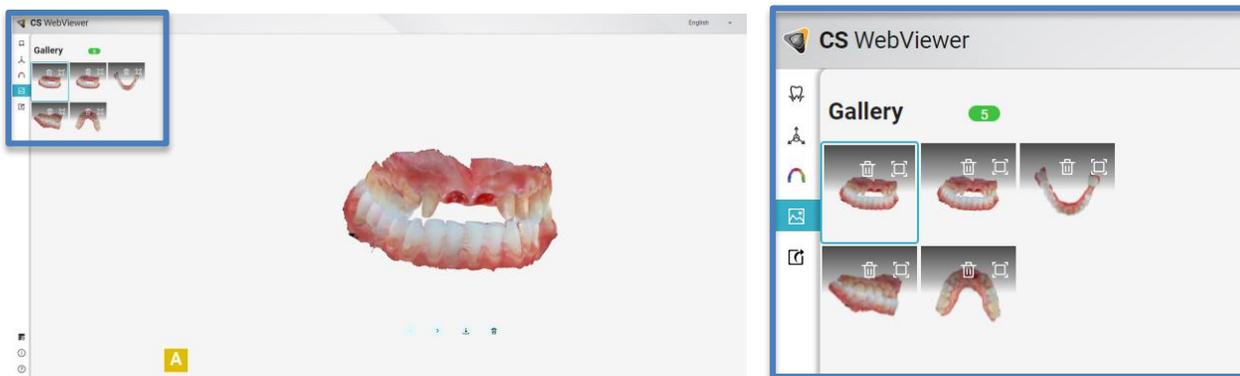

È possibile rivederle a schermo intero o eliminarle.

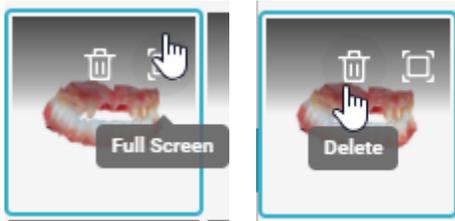


Premere la freccia di download nella parte inferiore dello schermo per salvare l'immagine acquisita in **formato PNG**.

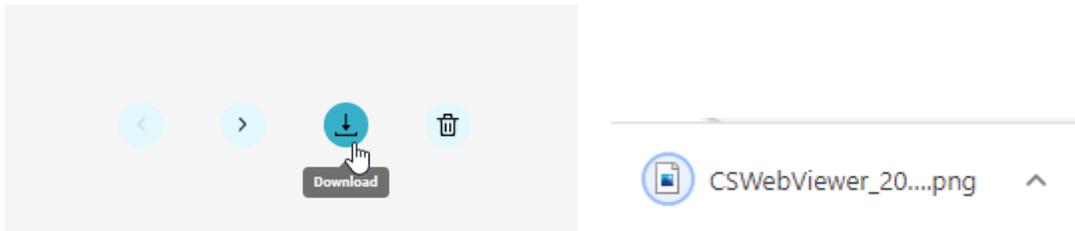

Visualizzazione della mappa di occlusione

Quando si preme l'icona di prossimità occlusale, CS WebViewer calcola e visualizza automaticamente la mappa della pressione di occlusione e ne fornisce all'utente gli indicatori.

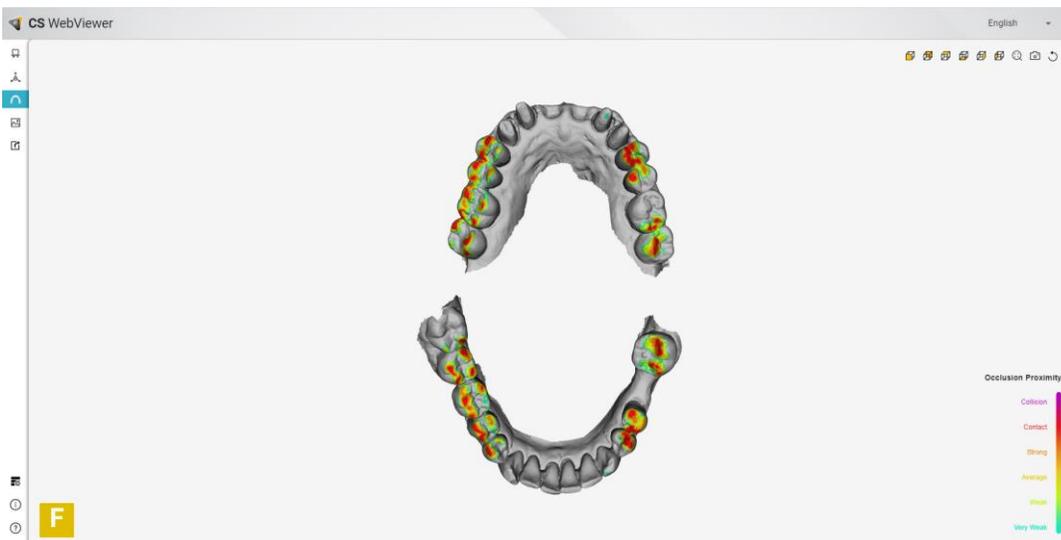

Calcolo e visualizzazione degli indicatori di prossimità occlusale automatizzati

Miglioramento dell'abbinamento con i partner Quick Connect:


Le capacità di esportazione di CS Connect semplificano l'esportazione dei dati ai partner preferiti del clinico per riabilitazioni protesiche, ortodontiche, implantari, chirurgia guidata, medicina del sonno, protesi rimovibili e custodie di dispositivi.

A tutto ciò va ad aggiungersi la novità di Carestream Dental: la Quick Connect Library, un ecosistema digitale che collega gli studi dentistici a fornitori notevoli del settore di tutto il mondo. Dalla pagina di esportazione di CS ScanFlow, i partner Quick Connect si trovano a un clic di distanza.


Gli utenti possono collegarsi con questi partner dell'odontoiatria digitale per completare il proprio flusso di lavoro digitale in base all'indicazione che desiderano ottenere. Dopo essere stato selezionato, il partner Quick Connect è autorizzato a ricevere senza limitazioni i dati dallo studio dentistico.



Accesso alla Quick Connect Library

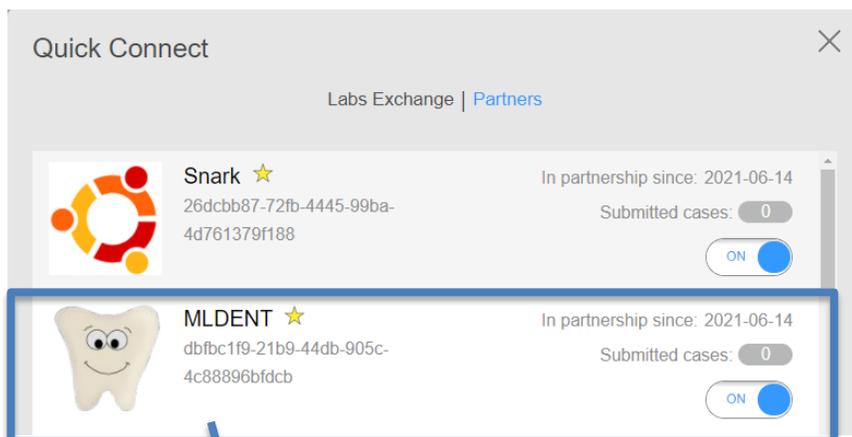

Finestra di configurazione della Quick Connect Library per attivare i partner nella pagina di esportazione di CS ScanFlow

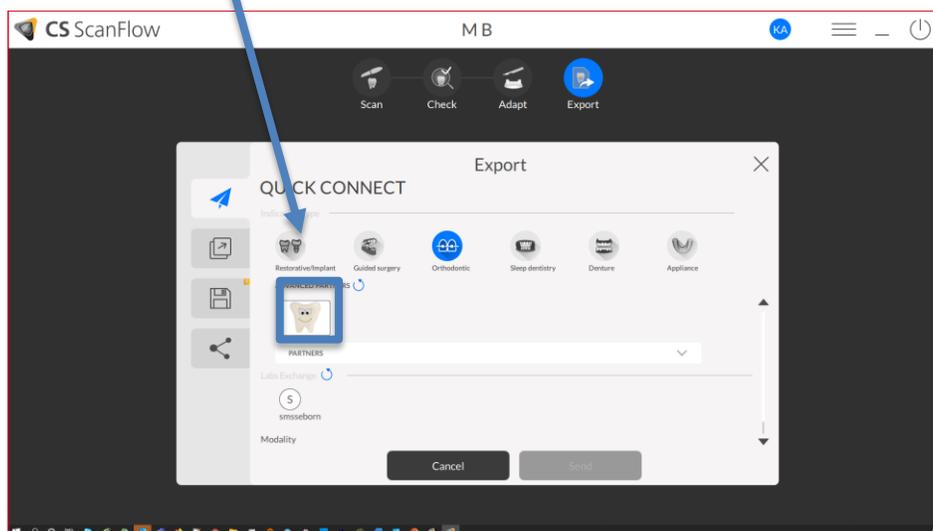

Visualizzazione avanzata dei partner nel software CS ScanFlow 1.0.4 con ulteriore abbinamento in CS Connect

CS Connect v4.5 dispone inoltre delle seguenti funzionalità:

- **Partner avanzati**
 - Il partner può essere designato come avanzato al fine di beneficiare di visualizzazione/evidenziazioni specifiche in altre applicazioni del portafoglio Carestream Dental.
- **Indicazione**
 - È possibile associare un'indicazione a un partner al fine di aggiungere criteri per filtrare i partner stessi nel software CS ScanFlow o nella pagina di esportazione di CS Imaging.
 - Implantologia/protesi, dispositivo per dormire, apparecchio, dentiera, ortodonzia
- **Formato predefinito**
 - Il partner può essere configurato per ricevere esclusivamente STL, PLY, OBJ, a seconda dei requisiti di integrazione discussi e del tipo di acquisizione (modello, ripristino, ecc.)

Nota: A partire dalla versione v4.5, CS Connect è disponibile per qualsiasi utente degli scanner intraorali Carestream Dental e non occorre più l'iscrizione a un piano CS Advantage.