

CS Connect

Comunicazione integrata
con il proprio laboratorio

Aggiornamenti v.4.5

Un modo migliore per trasferire i dati

Che cos'è CS Connect?

CS Connect è un portale online sicuro che facilita il trasferimento delle **impronte digitali** al laboratorio direttamente da CS ScanFlow

- Accesso ai set di dati scansionati quando si vuole
- Upload dei dati quando più comodo per il team dello studio
- Apertura direttamente da CS ScanFlow o dalla cartella di imaging del paziente
- Il proprio laboratorio può recuperare i file quando più comodo e può utilizzare il software CAD che preferisce



CS Connect

Chi utilizzerà CS Connect?

- CS Connect è stato progettato per i clienti di Carestream Dental che utilizzano dispositivi di scansione intraorale o sistemi CBCT che producono file di impronte digitali.
- Consente ai clienti di inviare immediatamente i file digitali delle impronte al laboratorio.
- CS Connect supporta flussi di lavoro di scansione protesica, del sonno, ortodontica e implantare.



Integrazione

In che modo CS Connect è diverso da altri metodi di trasferimento digitale?

- CS Connect è integrato nel flusso di lavoro ed elimina la necessità di lanciare portali indipendenti come Dropbox, Coffee Cup, Smart FTP o Filezilla
- Non è necessario cercare manualmente i file o copiarli e incollarli
- Un pratico dashboard aiuta a monitorare lo stato degli ordini di laboratorio



Perché scegliere CS Connect?



Accesso dal software di imaging di Carestream Dental: non è necessario avviare software di trasferimento file di terze parti



Trasferimento del modello in modo sicuro dallo studio al laboratorio, mantenendo l'integrità dei dati e prevenendo l'accesso non autorizzato




Il laboratorio può recuperare il set di dati in qualsiasi momento entro 14 giorni dal caricamento del file



Consente ai laboratori di creare moduli personalizzati e guida il clinico attraverso il processo di completamento

Invio di un caso

Integrazione diretta da CS Imaging

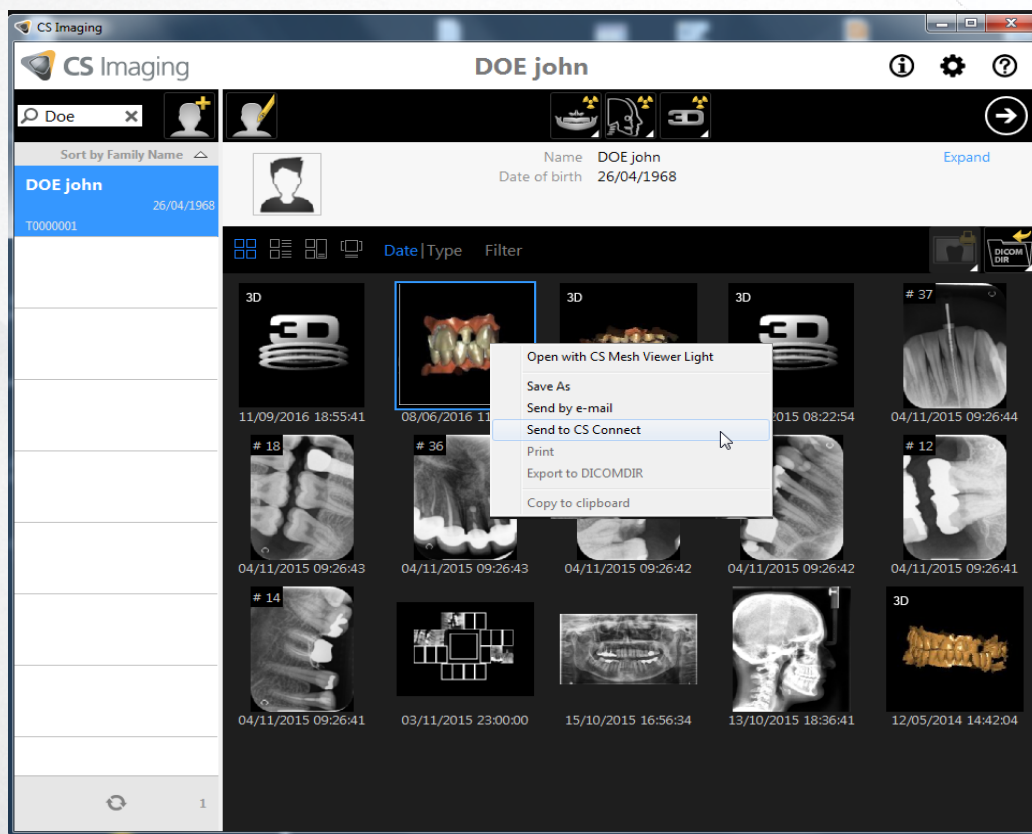


Dalla cartella CS Imaging del paziente:

- 1 Selezionare il modello da inviare e fare clic con il pulsante destro del mouse
- 2 Selezionare "Send to CS Connect" (Invia a CS Connect)
- 3 Si apre il portale CS Connect e viene creato automaticamente un nuovo caso per il modello digitale

Sicurezza

L'anonimizzazione dei dati protegge le informazioni sanitarie personali

- L'anonimizzazione dei dati fornisce tranquillità al dentista, in quanto consente la condivisione dei dati con il laboratorio senza trasferire informazioni personali sui pazienti
- Il laboratorio identifica il paziente mediante un carattere alfanumerico, non con il nome del paziente

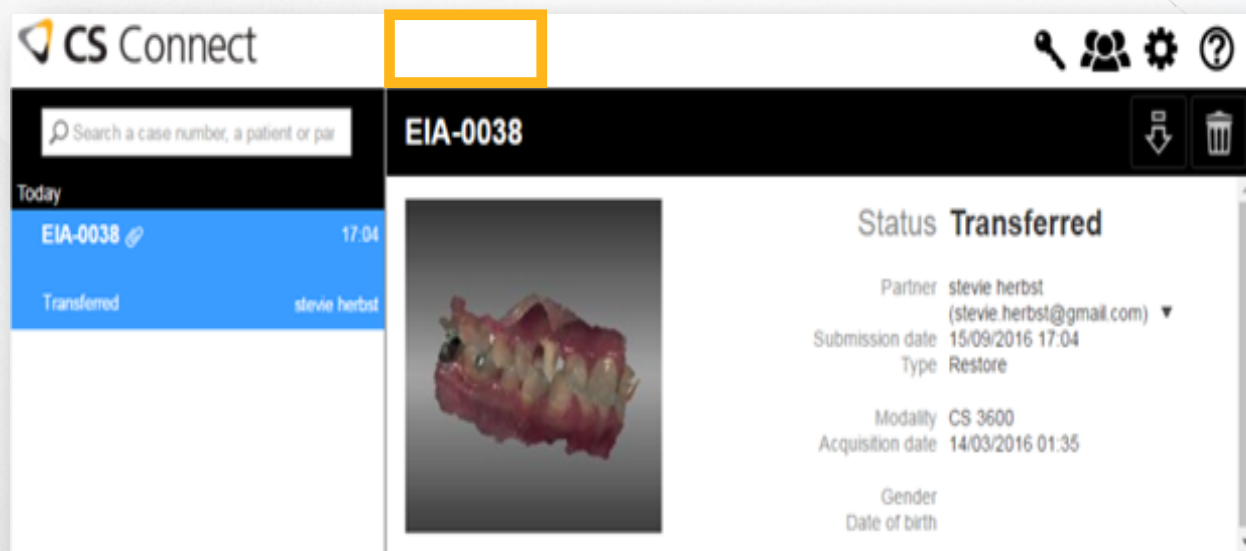

Sicurezza

- I dati inviati tramite CS Connect vengono automaticamente protetti contro l'accesso non autorizzato durante il trasferimento di file e temporaneamente archiviati nel cloud
- I dati sono crittografati dal PC dello studio prima del trasferimento e rimangono crittografati durante la permanenza nel cloud
- In caso di furto del server cloud o violazione della sicurezza, i dati non saranno leggibili
- Un meccanismo di sicurezza integrato supporta larghezza di banda ridotta e interruzioni di rete



Personalizzazione

I moduli personalizzati visualizzano automaticamente il modulo di laboratorio corretto

- Il modulo è legato al profilo del laboratorio in CS Connect
- I moduli vengono inviati al clinico quando l'e-mail del laboratorio viene selezionata dall'elenco
- Si elimina la necessità di scansionare i moduli cartacei di laboratorio convenzionali

Custom Case [X]

Type of Work and Tooth > Implant > Abutment > **Materials** > Design > Contact & Embrasure > Shade > Comment and Attachments

Summary

Select the type of work:

- ☒ Restorative Work
 - ☒ Crown
 - ☐ Partial Crown
 - ☐ Veneers
 - ☐ Bridge
- ☐ Implant Dentistry
 - ☐ Implant-supported crown

Select the concerned tooth:

Upper

Lower

Tooth N° 22

Previous Next

Custom Case [X]

Type of Work and Tooth > Implant > Abutment > Materials > Design > Contact & Embrasure > **Shade** > Comment and Attachments

Summary

Work Type: Crown
Tooth Number: 22
Material: All Ceramic - IPS e.max

Contact and Embrasure:

- ☐ Occlusal Clearance: No contact
- ☐ Interproximal Contact: Medium
- ☐ Gingival Embrasure: Natural

Shade Guide: Vita 3D-Master

Shades:

Color		
2L2	2L2	2L2
2L2	2L2	2L2
2L2	2L2	2L2

Occlusal

Occlusal Stain: None
Study Model Order: None

Comment
0 / 500 characters

submission forms have been provided.

Attached files
0 / 20 Mb

☒ I accept the [terms of use](#) and [privacy policy](#) of the service.


Previous Submit

Invio del caso con modulo


Una pratica procedura guidata




1 Scegliere il tipo di lavoro e selezionare il dente.

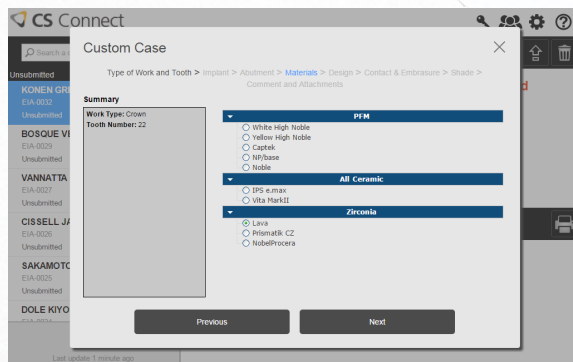


2 Selezionare il materiale.

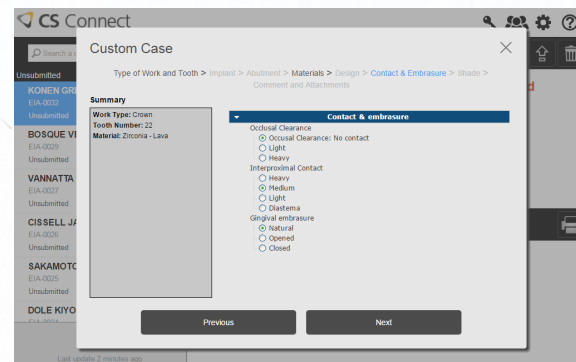


3 Specificare il progetto.

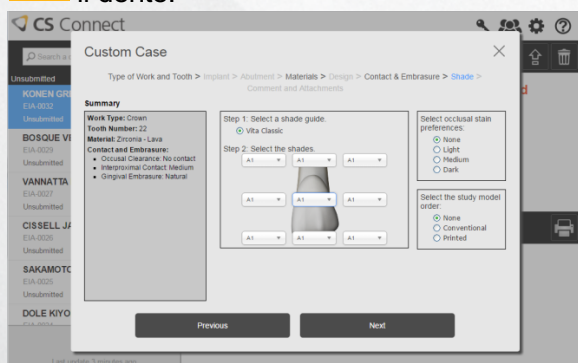

4 Specificare la tonalità.

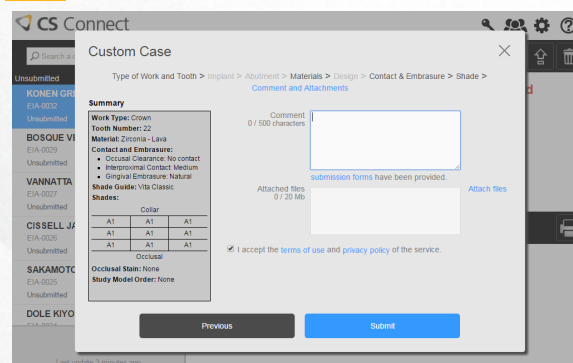

5 Aggiungere un riepilogo, un commento opzionale e/o ulteriori file allegati.

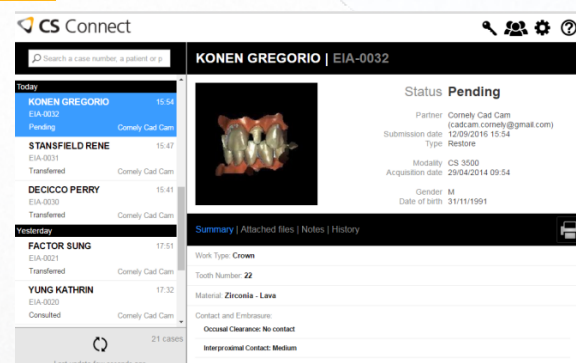

6 Una volta inviato, si viene reindirizzati all'elenco dei casi. Il caso verrà visualizzato come in sospeso per alcuni secondi fino al completamento del trasferimento.

WebView di CS integrato

WebViewer di CS integrato


CS WebViewer include le seguenti funzionalità:

- Ampie opzioni di visualizzazione
 - Spostamento, zoom e panoramica con il mouse
 - Visualizzazione arcata
 - Passaggio di rendering da colore monocromatico a HD
 - Trasparenza
 - Visualizzazione della linea margine
 - Visualizzazione scanbody
- Novità:
 - Colore di sfondo bianco intuitivo per un esame migliore
 - Strumento di regolazione dell'orientamento ed esportazione del modello 3D regolato in STL / PLY
 - Visualizzazione della mappa di occlusione
 - Acquisizione ed esportazione delle istantanee 2D
- Visualizzazione di un'istanza di CS WebViewer alla volta
 - Quando viene caricata una mesh, la finestra viene attivata
 - Nuove mesh sostituiscono quella precedentemente visualizzata
- Le finestre possono essere spostate e riorientate ovunque sullo schermo
 - I laboratori possono visualizzare la mesh mentre visualizzano i commenti o scaricano il caso

Webviewer di CS integrato

Ora basato su cloud, CS WebViewer consente al laboratorio di visualizzare la linea di margine 3D a colori HD in tempo reale, migliorando la comunicazione con il medico senza la necessità di installare software aggiuntivi.

Visualizzazione dei set di dati direttamente da CS Connect

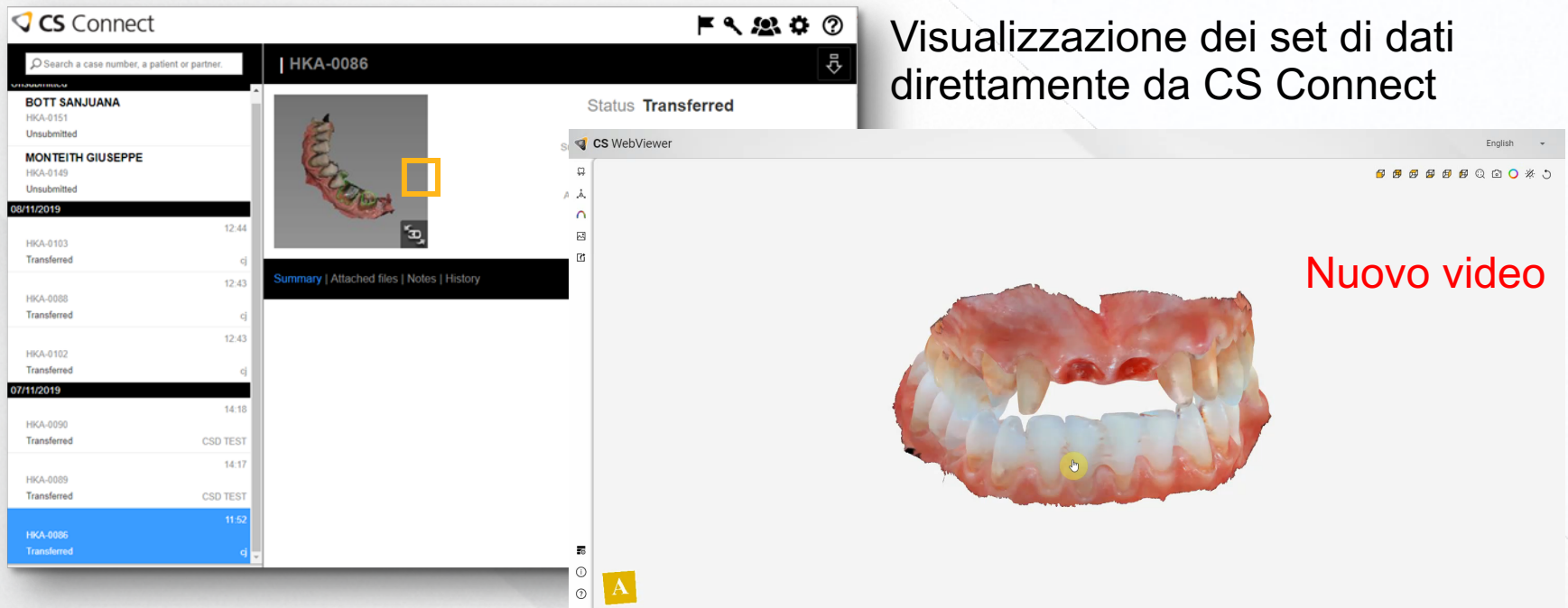


Nuovo video

Fare clic in un punto qualsiasi della miniatura per aprire CS WebViewer quando è presente




CS WebViewer


Revisione e controllo della scansione prima di procedere con le fasi successive

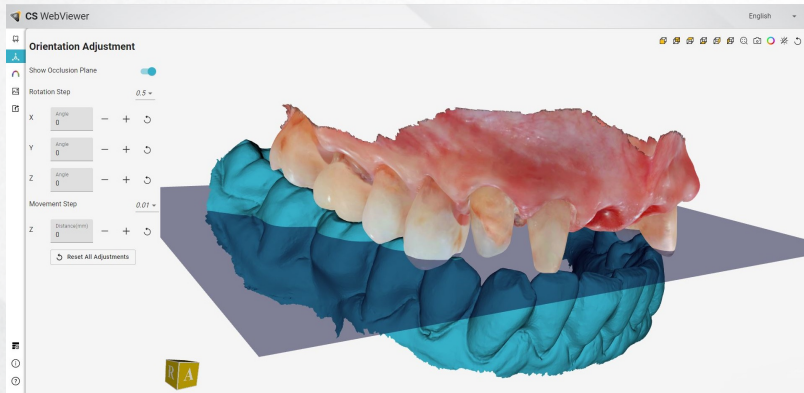


Strumento di regolazione orientamento

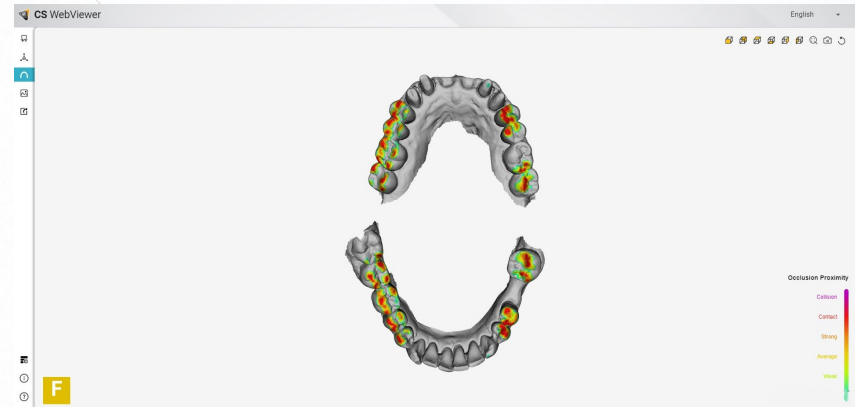

Visualizzazione della mappa di occlusione

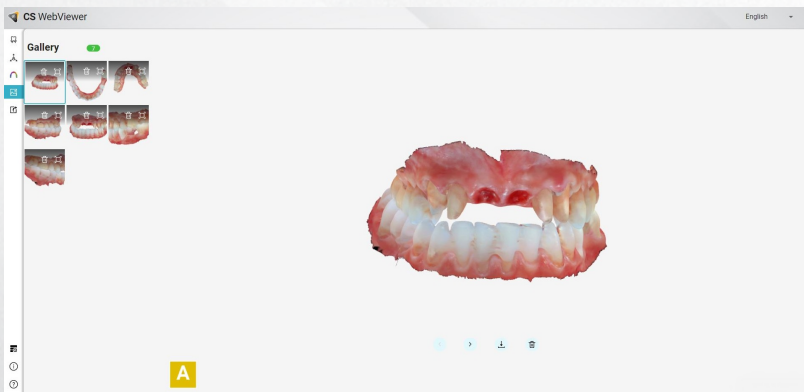

Acquisizioni e download di istantanee

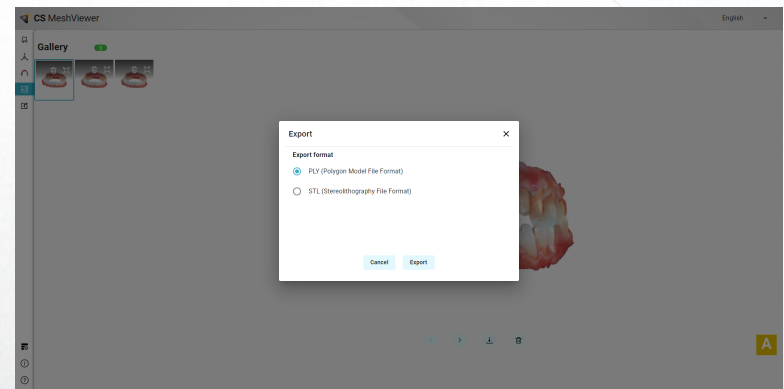

Funzionalità di esportazione

CS WebViewer

Visualizzazione dei set di dati a portata di mano

Visualizzazione delle immagini direttamente dal proprio iPhone tramite il WebViewer CS integrato



NOTA: le performance dipendono dall'unità di elaborazione grafica (GPU). Compatibile con iPhone, non compatibile con Samsung Tab4 (GPU Vivante)



Invio al partner

Invio al partner

Modalità di invio dei set di dati nelle versioni precedenti

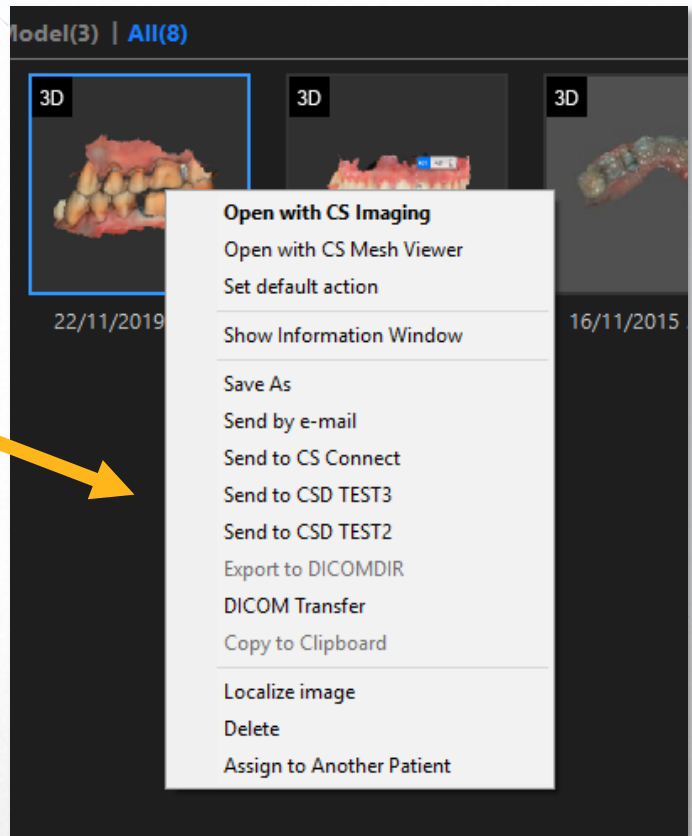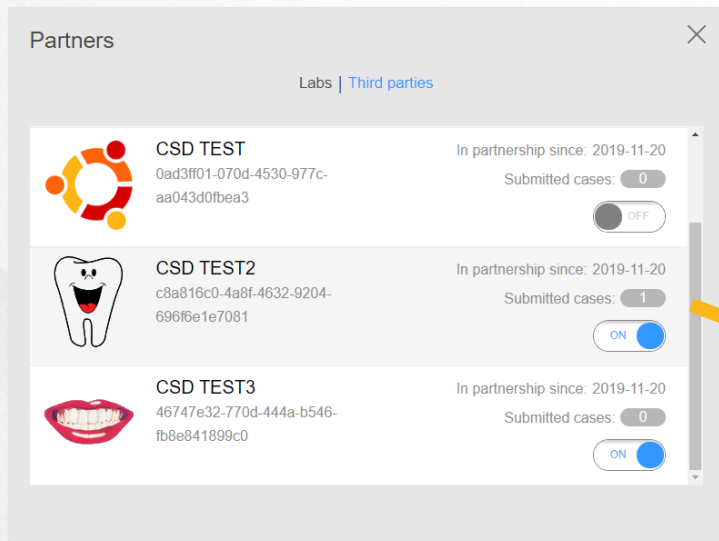


- L'agente CS Connect rileva l'associazione tra almeno un utente CS Connect sulla workstation e un determinato partner e CS Imaging propone l'invio del caso al partner
- Il caso viene inviato al partner per conto dell'utente CS Connect che ha installato CS Connect sulla workstation

Invio al partner

Un modo più semplice per inviare set di dati


- CS Imaging ora riconosce quale utente CS Connect sia associato a quale partner e quindi può inviare il caso al partner per conto dell'utente corretto

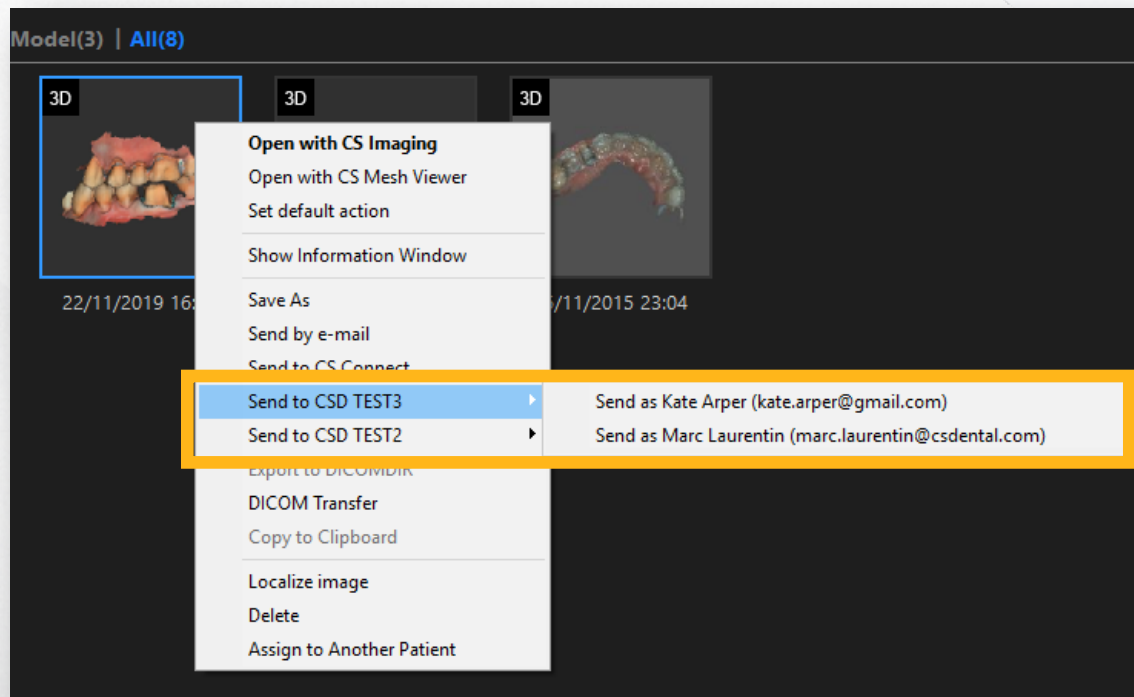

Nuova integrazione API



Nuova integrazione API

CS Connect rende accessibili tutti i partner Quick Connect con un semplice clic del mouse

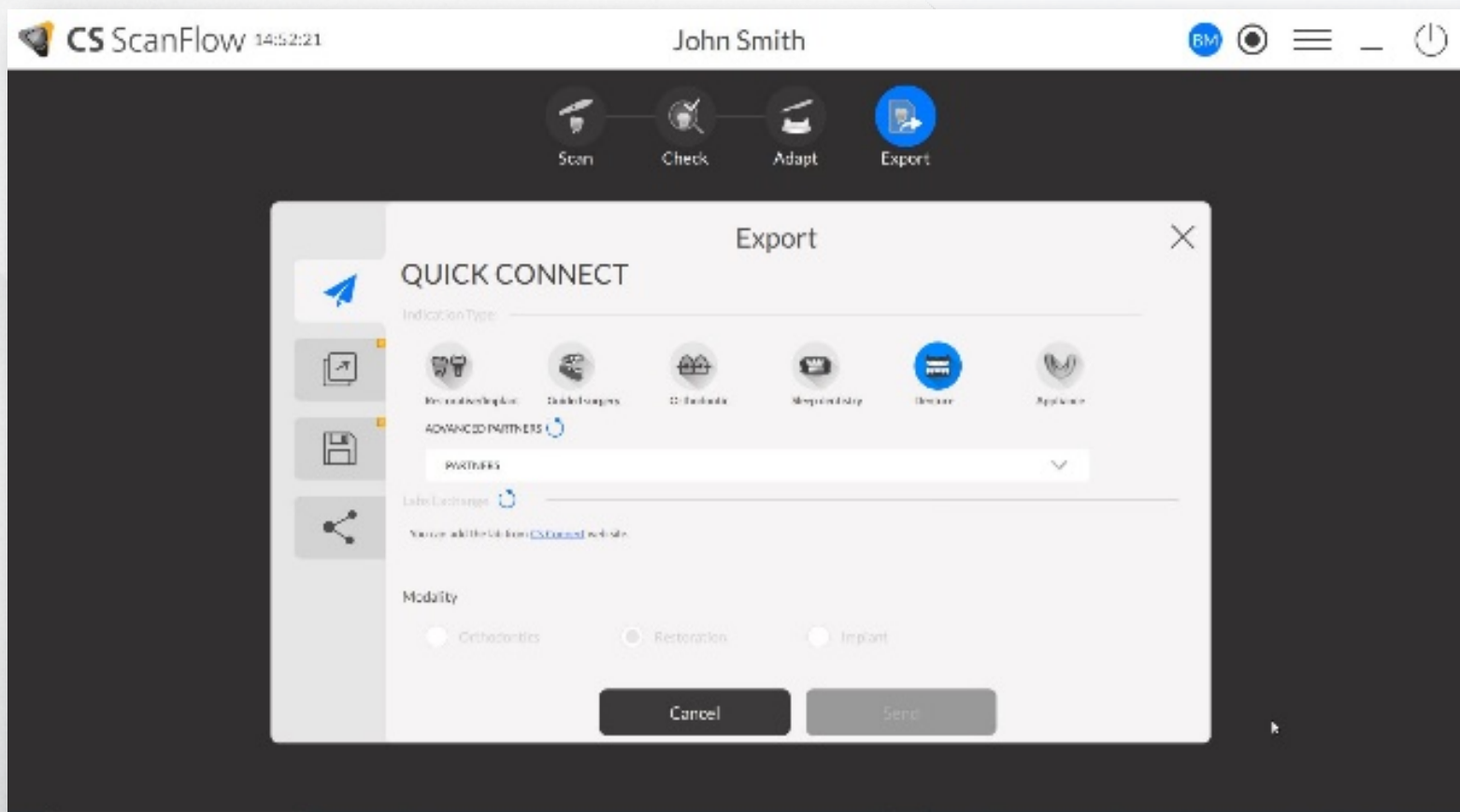


Nuova integrazione API

Il servizio web recupera l'elenco dei laboratori invitati

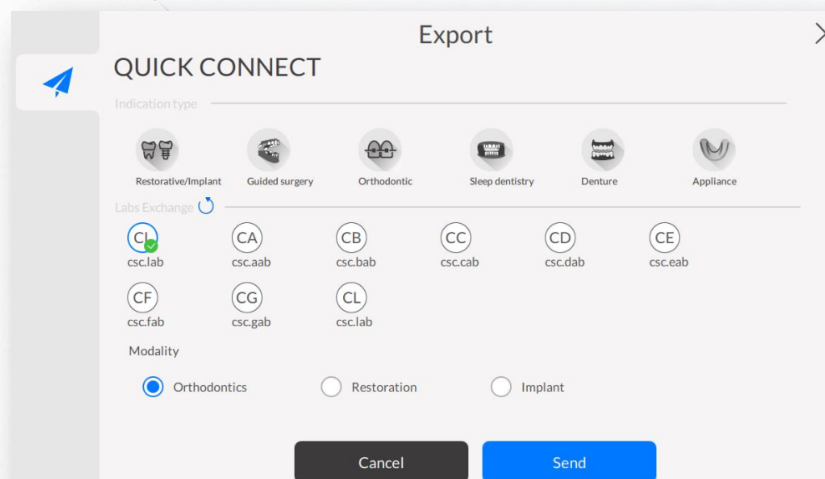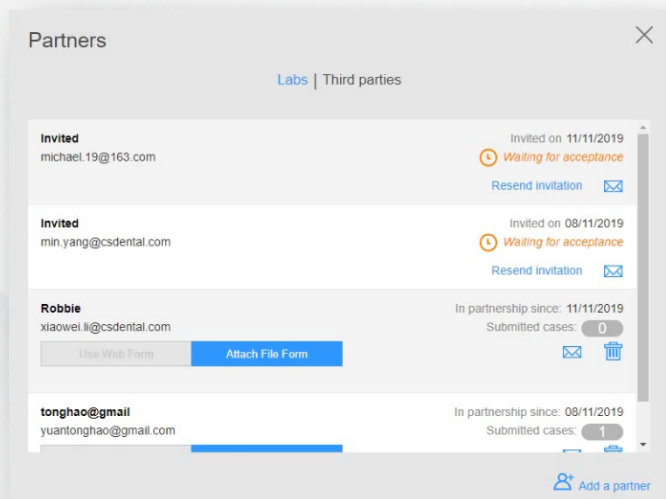


L'API fornisce le seguenti informazioni:

- Laboratori che hanno accettato l'invito dell'odontoiatra
- Partner che collaborano con l'odontoiatra associato

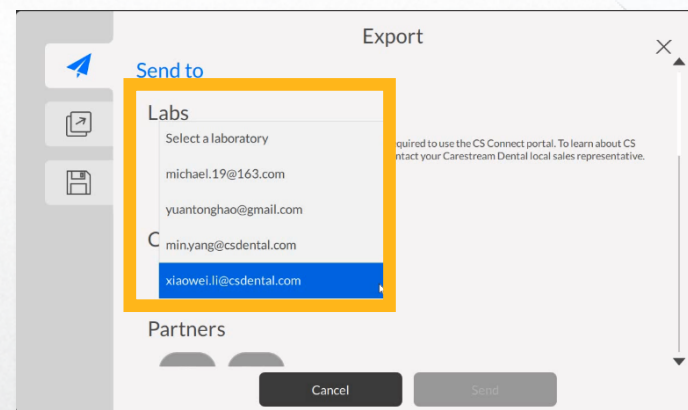


Nuova integrazione API

Preselezione automatizzata del laboratorio invitato

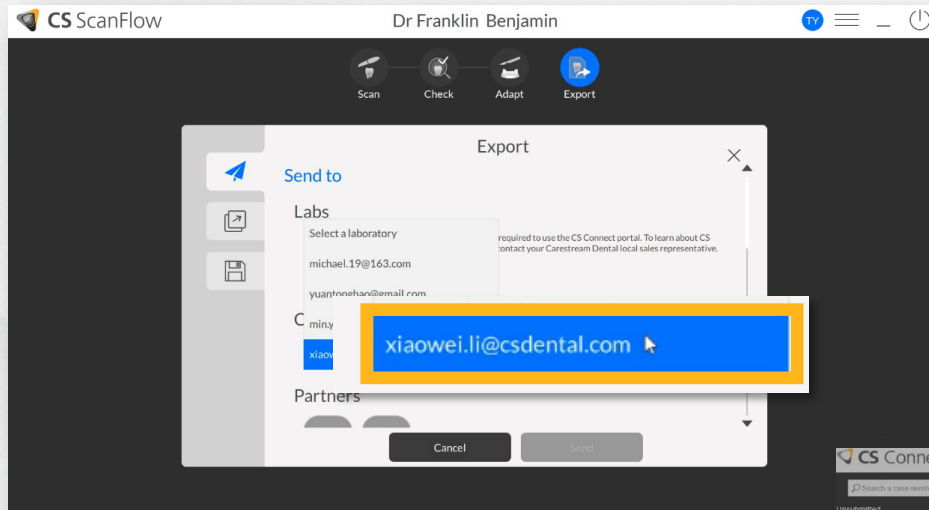

Il laboratorio selezionato da CS ScanFlow viene scelto automaticamente in CS Connect

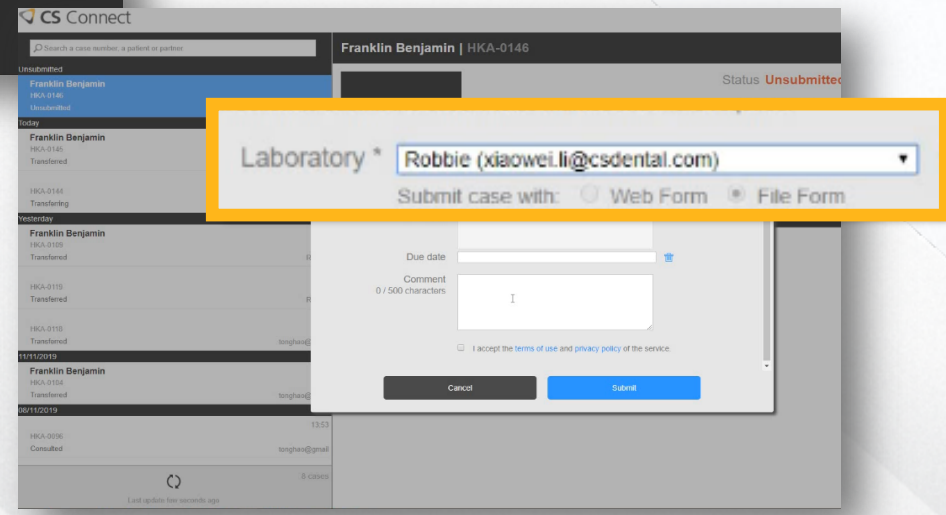



Grazie