

Esportare immagine da software Carestream

Selezionare l'immagine radiografica che si vuole esportare e fare clic sul menu "File"

Scegliere la funzione "Invia a"

The screenshot shows the 'File' menu of the CS Imaging Software. The menu items are: Nuova immagine RVG... (F2), Nuova immagine panoramica... (F3), Nuova immagine cef... (F4), Nuova immagine 3D... (F8), Nuova acquisizione oggetto 3D... (F9), Nuova immagine dalla telecamera intraorale (F5), Nuova immagine CR..., Apri anamnesi... (Ctrl+O), Salva... (Ctrl+S), Chiudi, Elimina, Stampa..., Imposta stampante..., Sequenza di immagini, Report, Report in Word, Importa file di immagine..., Importa da fotocamera digitale..., Importa volumi 3D..., DICOMDIR, TWAIN, Copia (Ctrl+C), Incolla (Ctrl+V), **Invia a** (highlighted), and Esci.

Si apre una finestra al centro dello schermo che consentirà l'esportazione dell'immagine in 4 passaggi:

The 'Esporta' dialog box is open, showing the following options:

- Invia a:**
 - Destinataro e-mail
 - Posizione cartella
- Immagine:**
 - Nome file: Q1
 - Formato file: File Carestream - Formato grande
 - Percentuale di: 90
 - Annotazioni
 - Information
- IMS:**
 - Nome file: []
 - Formato file per: File Carestream IMS
 - Percentuale di: 90
 - Colore sfondo: Bianco
 - Alta risoluzione
 - Basso risoluzione
 - Copia di ciascuna immagine
 - Formato file per singola: File Carestream - Fun
 - Percentuale di: 90
- Altro:**
 - Visualizzatore 3D
 - Imprenta digitale
 - Aggiungi report
 - Aggiungi modelli
 - Tutto in un file .zip
 - Salva e conserva gli stessi nomi


Buttons: OK, Annulla

1) Scegliere dove salvare il file:

clik su **“Posizione cartella”**

e


clik su **“Seleziona”** per scegliere il percorso di memorizzazione

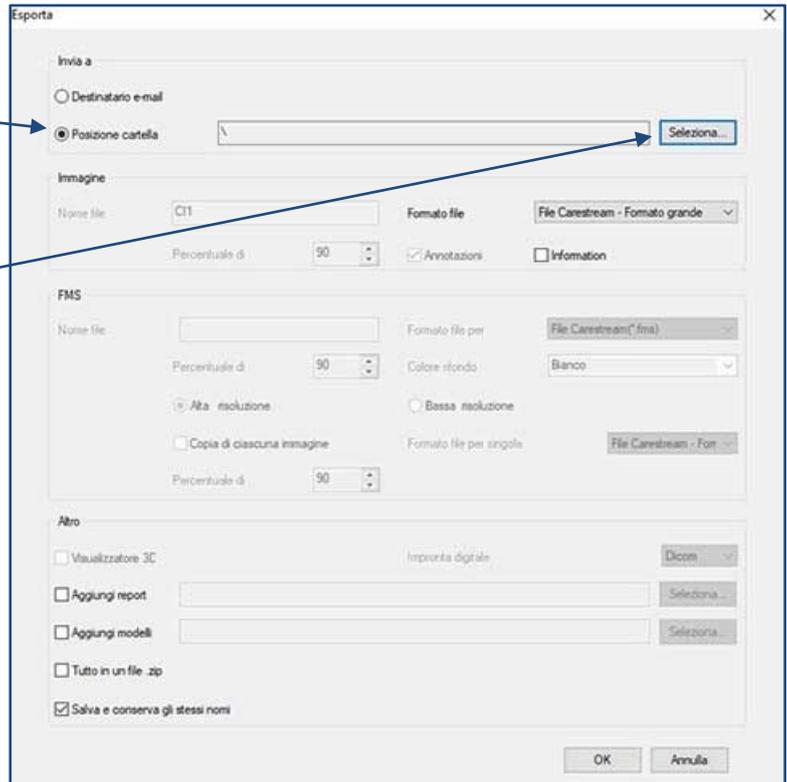

2) Scegliere il formato immagine

Clic sulla freccia e dall’elenco scegliere il formato immagine:
se l’immagine va consegnata ad un paziente si consiglia il formato JPG (compressato) o il formato BMP (dimensioni maggiori)

se l’immagine va importata in un altro software Carestream scegliere il formato “Carestream Grande”

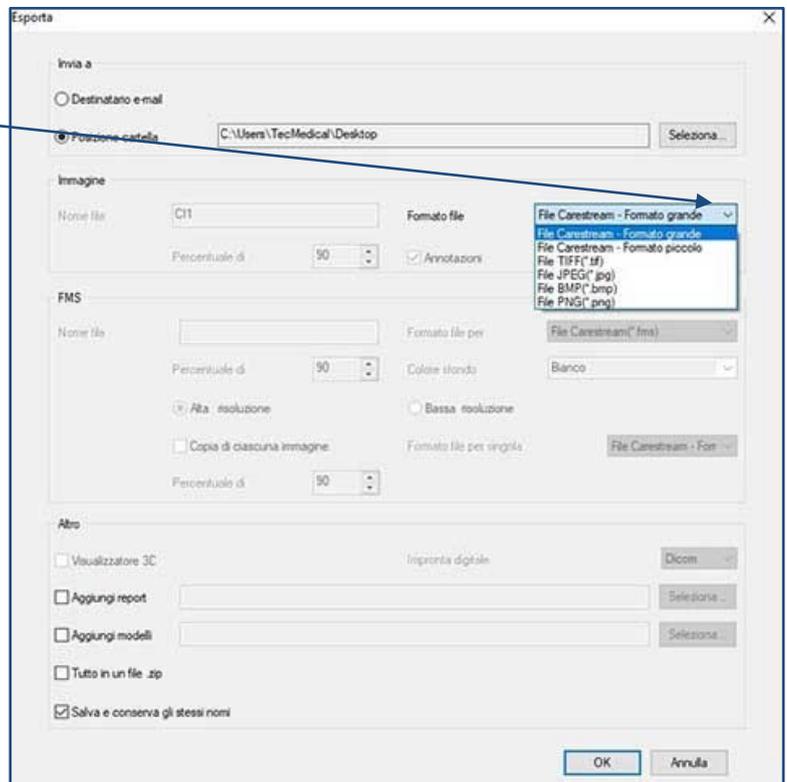

3) Modificare il nome del file

Per impostazione predefinita il programma numera progressivamente le immagini del paziente con davanti una "sigla" che le identifica (rx, panoramiche, Cefalometria ecc).

Togliendo il segno di spunta nell'opzione: **"Salva e conserva gli stessi nomi"**

The 'Esporta' dialog box shows the following settings:

- Invia a:** Posizione cartella (C:\Users\TecMedical\Desktop)
- Immagine:** Nome file: C11, Formato file: File Carestream - Formato grande, Percentuale di: 90, Annotazioni, Informazioni
- FMS:** Nome file: [], Formato file per: File Carestream(.fms), Percentuale di: 90, Colore sfondo: Bianco, Alta risoluzione, Basso risoluzione, Copia di ciascuna immagine, Formato file per singola: File Carestream - For...
- Altro:** Visualizzatore 3D, Aggiungi report, Aggiungi modelli, Tutto in un file .zip, Salva e conserva gli stessi nomi

Si attiva la casella del nome del file in modo da poter essere modificato

4) Salvare il file

Clic su **"OK"** per memorizzare.

La finestra si chiude automaticamente.

The 'Esporta' dialog box shows the following settings:

- Invia a:** Posizione cartella (C:\Users\TecMedical\Desktop)
- Immagine:** Nome file: NOME FILE, Formato file: File Carestream - Formato grande, Percentuale di: 90, Annotazioni, Informazioni
- FMS:** Nome file: [], Formato file per: File Carestream(.fms), Percentuale di: 90, Colore sfondo: Bianco, Alta risoluzione, Basso risoluzione, Copia di ciascuna immagine, Formato file per singola: File Carestream - For...
- Altro:** Visualizzatore 3D, Aggiungi report, Aggiungi modelli, Tutto in un file .zip, Salva e conserva gli stessi nomi