



## Esportare una panoramica

Sull'immagine della panoramica nella dashboard del paziente fare un clic con il pulsante destro del mouse, si apre un menu da cui scegliere la funzione **“Salva con nome”**

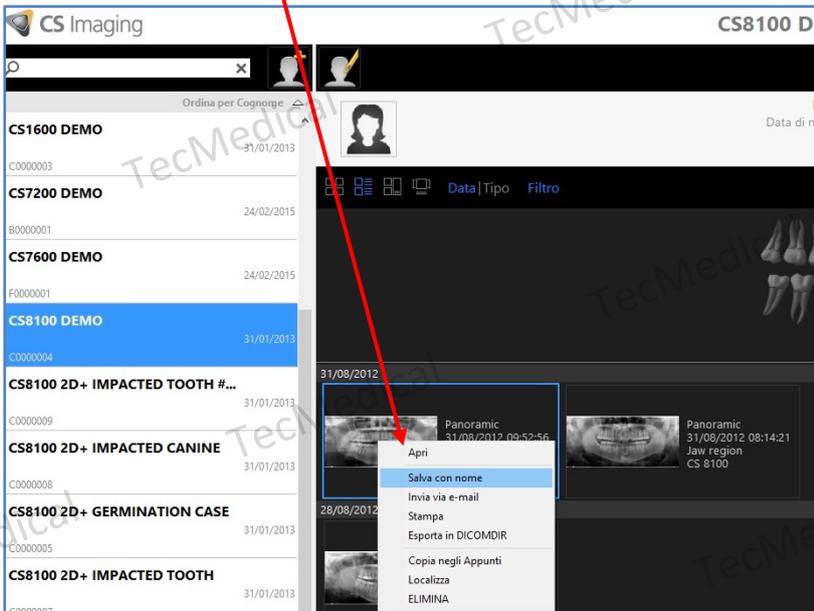

Si apre una finestra in cui è possibile:

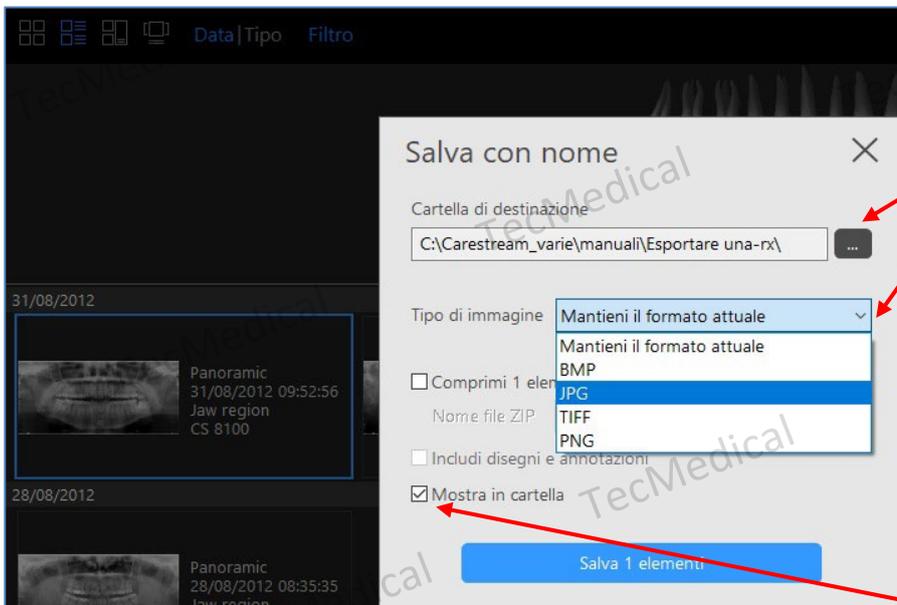


Scegliere il percorso di destinazione in cui sarà salvata l'immagine (clic sul riquadro con i puntini)

Scegliere il formato grafico dell'immagine (per pazienti e/ o assicurazioni consigliato "JPG" – per chi dispone del software Carestream "Mantieni il formato originale").

Selezionare l'opzione **“Mostra in cartella”** che apre automaticamente la cartella in cui è stato salvato il file.

Selezionando l'opzione "**Comprimi 1 elementi**" nel percorso di destinazione verrà creato un file compresso con estensione .zip dell'immagine.

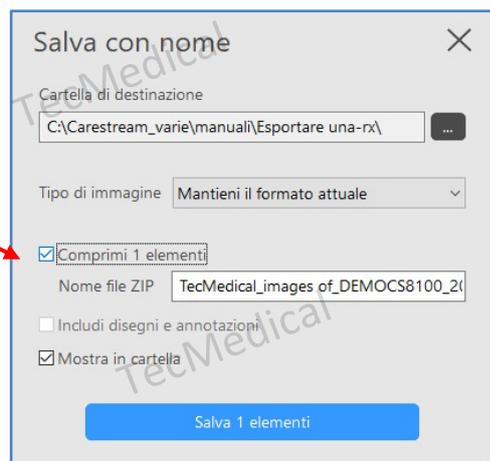

\*\*\*FINE CAPITOLO\*\*\*