

Installazione dei driver di CS 7200


- 1 Inserire il DVD-ROM del software del driver dello scanner nell'apposita unità.
- 2 Attendere l'avvio del programma di installazione.




Nota: Se l'installazione non viene caricata, eseguire il file della procedura guidata che si trova nel DVD-ROM di installazione.

Name	Date modified	Type
data	11/12/2015 10:57 ...	File folder
theme	11/12/2015 10:57 ...	File folder
autorun	2/4/2013 8:49 AM	Setup Inforr
freeglut.dll	8/27/2015 2:28 PM	Application
OpenCL.dll	8/27/2015 2:28 PM	Application
wizard	11/3/2015 2:53 PM	Application


3. Selezionare la lingua dall'elenco nella parte in alto a destra della finestra della procedura guidata di installazione.

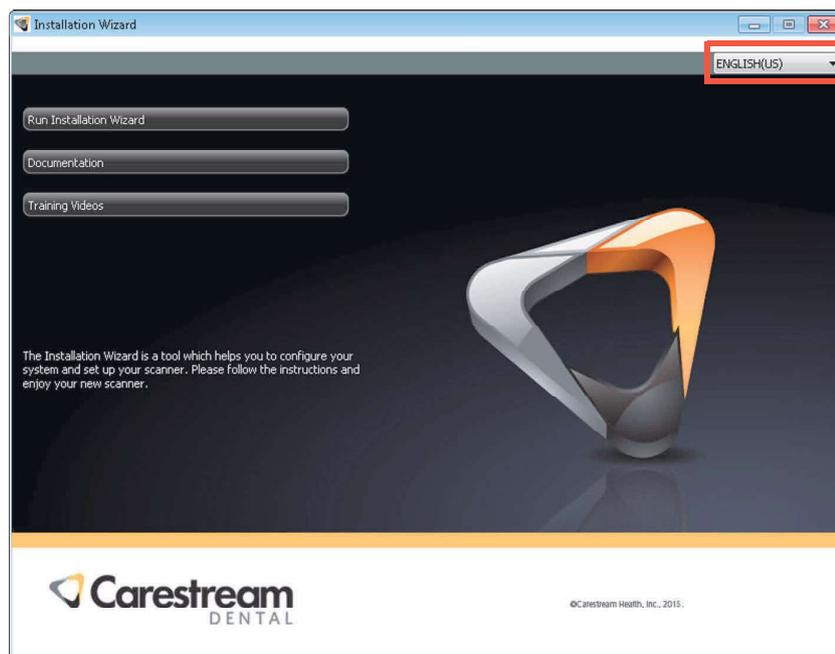

4. Fare clic su Esegui procedura guidata di installazione per continuare l'installazione.

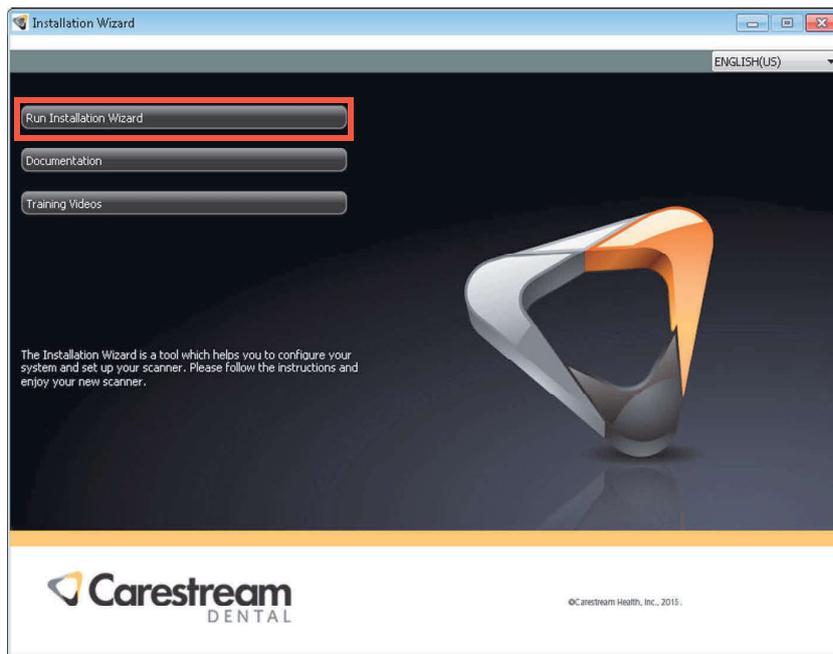


5. Vengono verificati i requisiti di sistema minimi e lo stato di ciascuna voce verificata viene visualizzata. Fare clic su **Avanti** per continuare l'installazione.

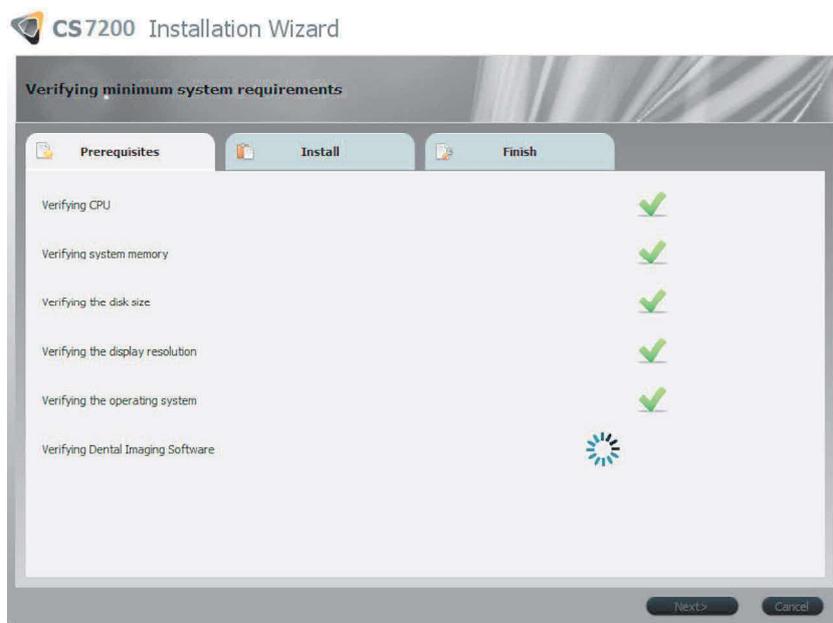





Nota: Se viene visualizzata una X rossa accanto a una delle voci, fare clic su Guida, per visualizzare la descrizione del problema. Accertarsi quindi che il computer risponda ai requisiti minimi di sistema.

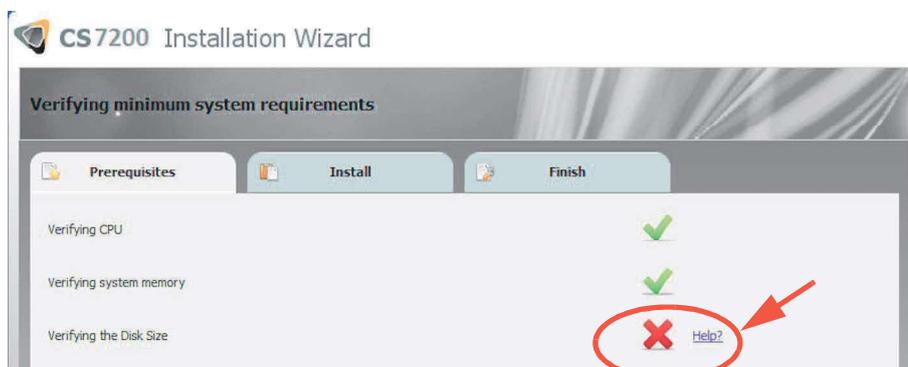


6. Nella finestra **Acquisizione immagini IP2**, fare clic su **Installa** per installare i plug-in necessari sul proprio computer.

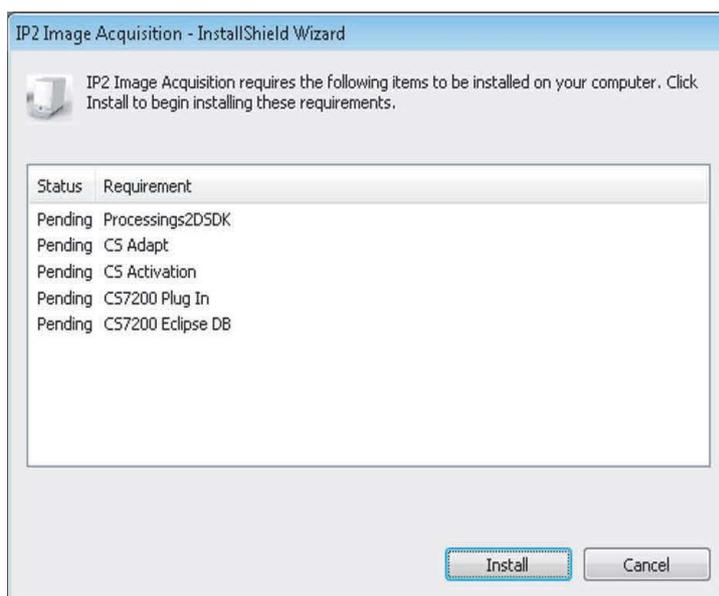


7. Viene visualizzata la finestra **Benvenuto**. Fare clic su **Avanti** per continuare il processo di installazione.

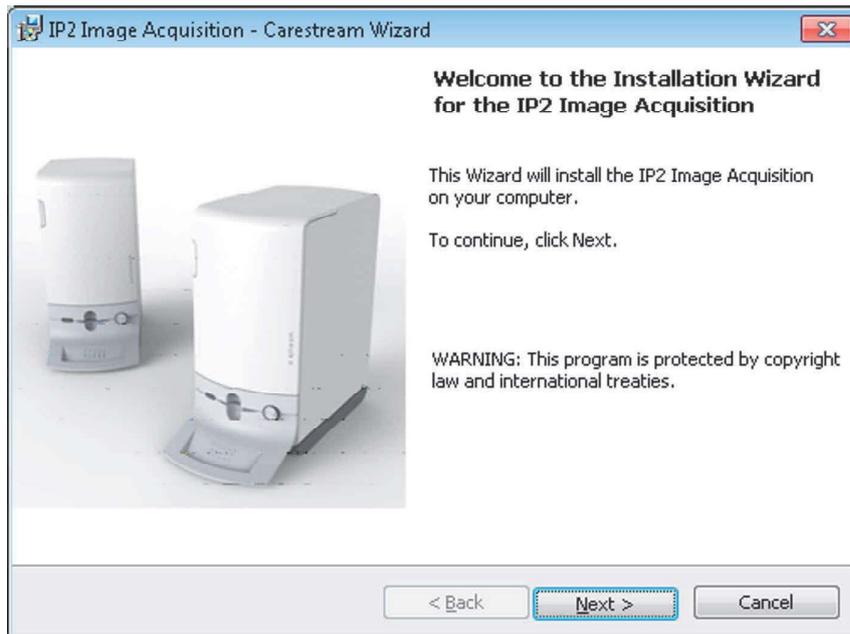


8. Viene visualizzata la finestra **Cartella di destinazione**. Fare clic su **Avanti** se si accetta la cartella di destinazione predefinita oppure selezionare un'altra cartella di destinazione e quindi fare clic su **Avanti**.

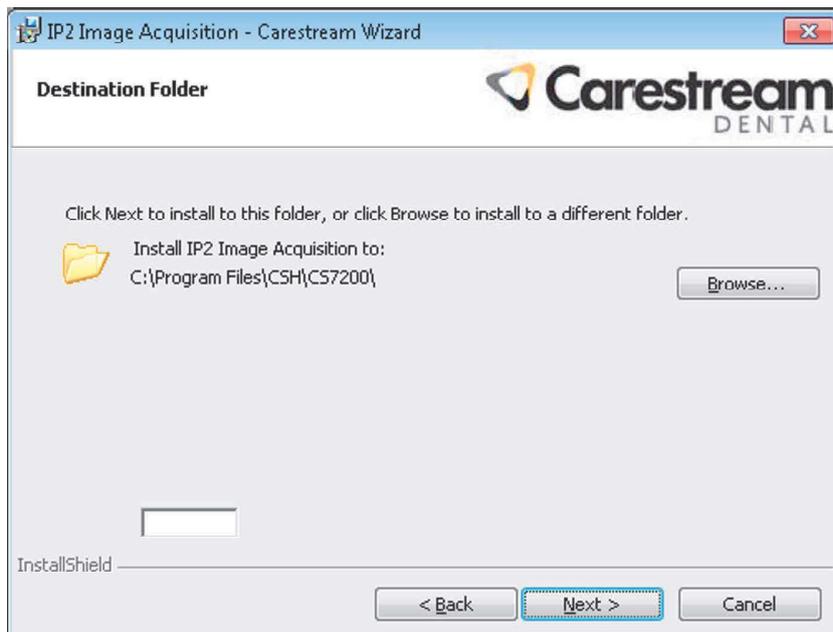


9. Attendere che il sistema installi il software.

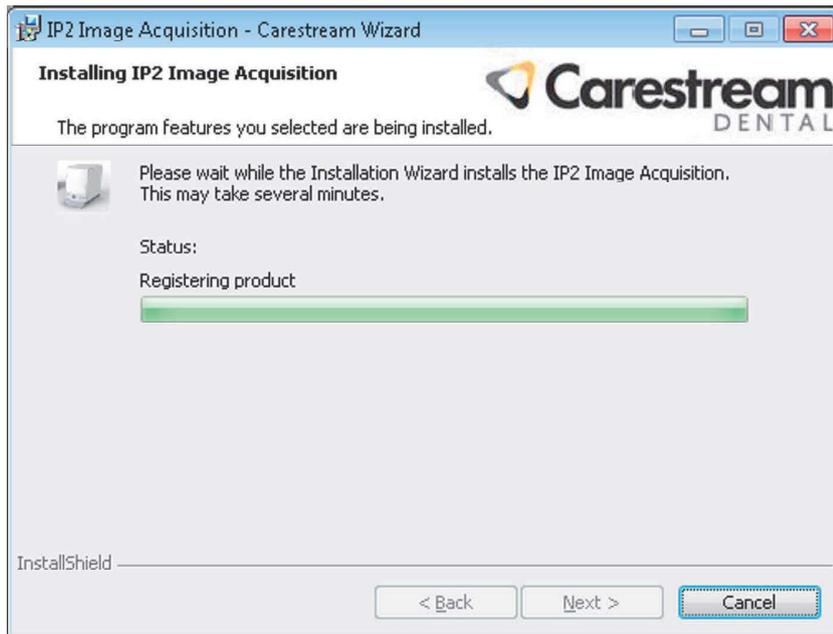


10. Viene visualizzata la finestra **Nuovi file dello scanner**. Fare clic su **Avanti** per continuare senza aggiornare i file dello scanner.

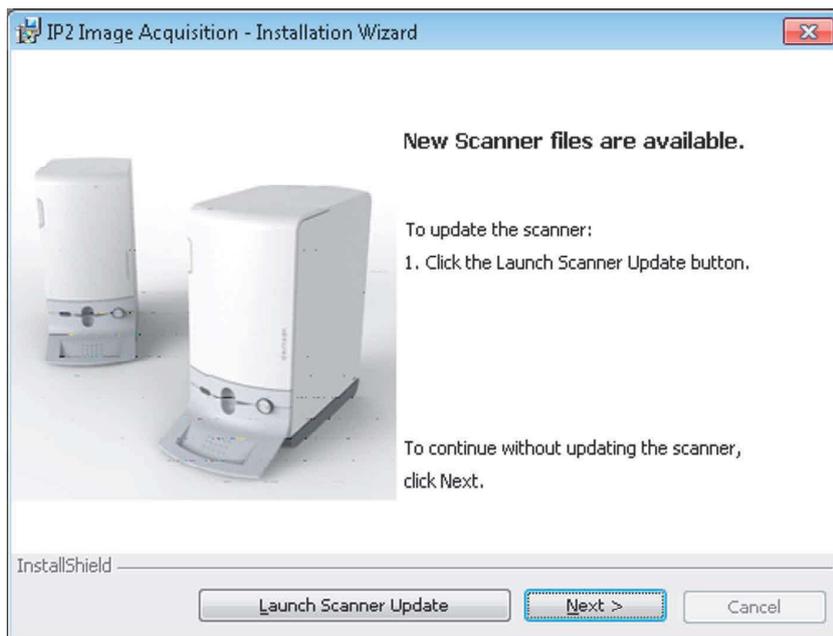

11. Viene visualizzata la finestra **Procedura guidata di installazione completata**. Fare clic su **Fine** per terminare l'installazione.

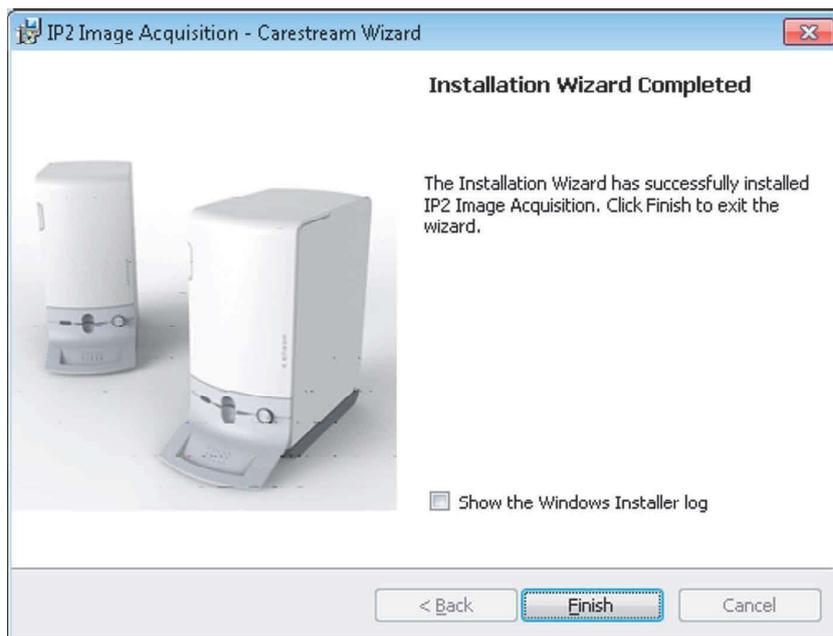


12. Sulla scheda **Fine**, fare clic su **Fine** per completare l'installazione.

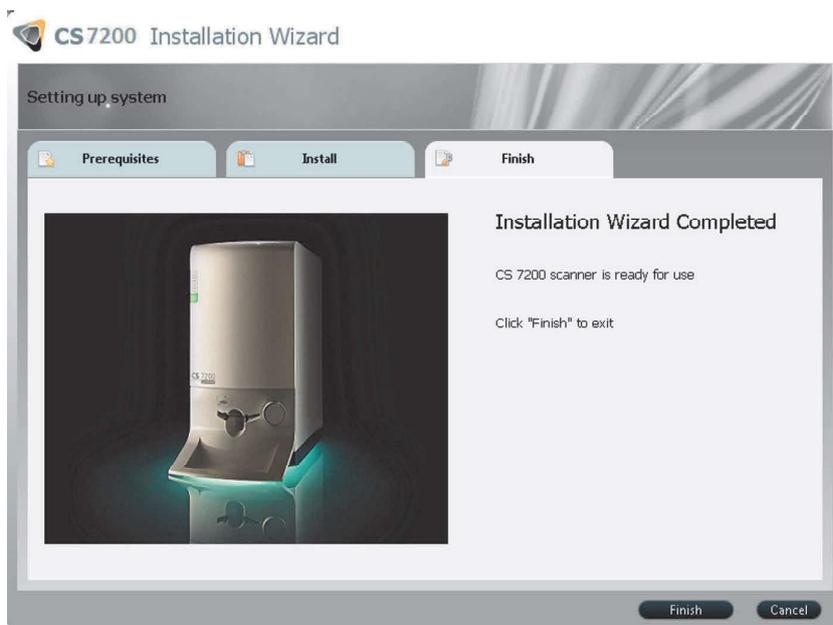

Attivazione della chiave di licenza

Al fine di offrire un'esperienza costante e sicura quando si accede alle applicazioni Carestream Dental, alcune funzionalità di CS Imaging richiedono l'attivazione tramite chiave di licenza. Andare su CS Activation e seguire le istruzioni di registrazione sulla Guida online di CS Activation.

Test post-installazione CS 7200

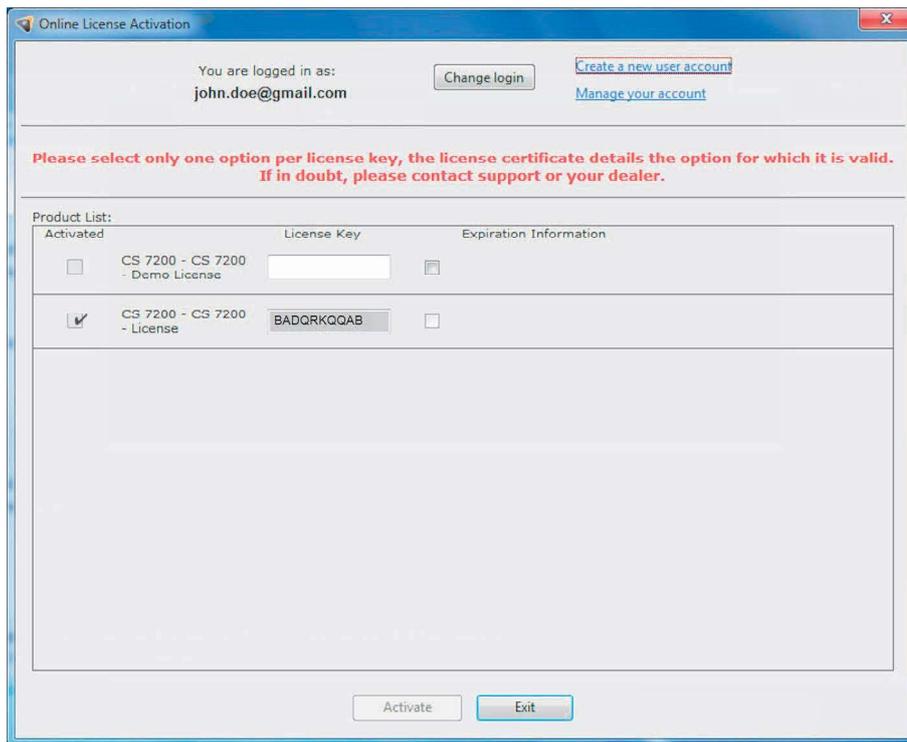

Dopo l'installazione dello scanner e del software, verificare che tutti i componenti dello scanner siano installati correttamente e che le immagini scansionate siano visualizzate correttamente nel CS Imaging Software.

1. Avviare CS Imaging Software e selezionare o creare un paziente per il test. Vedere "Avvio del Software di imaging" a pagina 38.
2. Esporre una lastra formato 2 e poggiarvi un oggetto metallico (come una moneta o una chiave).
3. Caricare la lastra esposta nello scanner e attendere fino al completamento della scansione e alla visualizzazione dell'immagine sulla schermata principale del CS Imaging Software.



4. Chiudere la schermata principale del CS Imaging Software.