


Istruzioni per la condivisione e visualizzazione in rete del database Carestream

CONDIVISIONE CARTELLA DATABASE

La posizione predefinita del database Carestream è:

C:\Users\Public\Documents\Carestream\DB

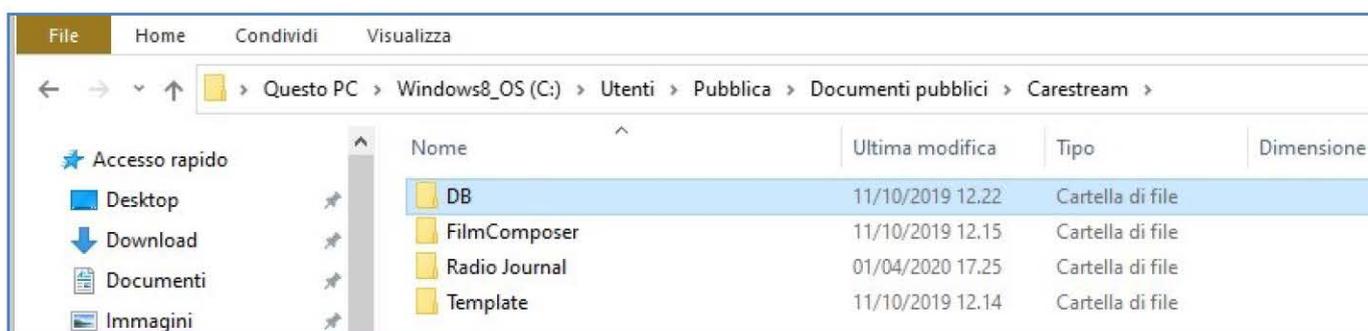

Si consiglia di condividere tutta la cartella Carestream e non soltanto la cartella DB così che possano essere condivisi anche eventuali template di stampa personalizzabili.

N.B. è possibile spostare il database in un'altra posizione copiando/tagliando semplicemente la cartella nella destinazione diversa. Si dovrà impostare poi il percorso nella funzione "**Monitor**" descritta nel prossimo paragrafo.

IMPOSTAZIONE DEL DATABASE SUL PC LOCALE

Il software CS Imaging Versione 7 gestisce il database delle immagini e l'elenco dei pazienti mediante **CSDM Lite**. Un'applicazione chiamata "**Monitor**" consente di verificare lo stato di **CSDM Lite**. È inoltre possibile utilizzare Monitor per:

- Riavviare **CSDM Lite**.
- Determinare la posizione della cartella del database.
- Selezionare una cartella del database diversa.

Apertura di Monitor e verifica di CSDM Lite


Per visualizzare le impostazioni di "**Monitor**":

Nella barra delle applicazioni sul desktop del computer, fare clic col pulsante sinistro mouse sull'icona del simbolo **Carestream**



del


(se questa icona non è visibile, provare a fare clic sulla freccetta in alto per rivelare le icone nascoste).

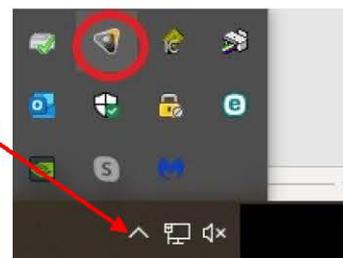


ATTENZIONE

se non è possibile visualizzare l'icona "Monitor" sulla barra delle applicazioni desktop, cercare l'applicazione "Monitor" dall'elenco dei programmi Carestream e fate un clic con il pulsante sinistro

Ritornate sulla barra delle applicazioni desktop e troverete l'icona

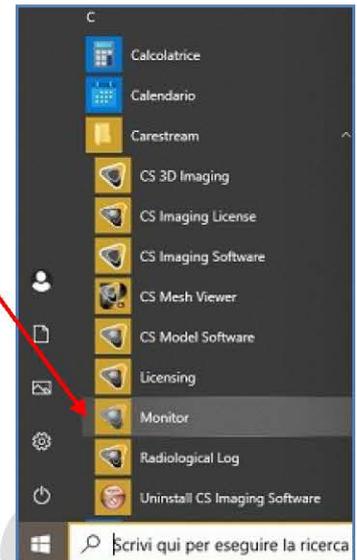

Si apre la finestra di "Monitor", quando CSDM Lite è attivo e funziona correttamente, la colonna dello stato in "Monitor" viene visualizzata in verde.

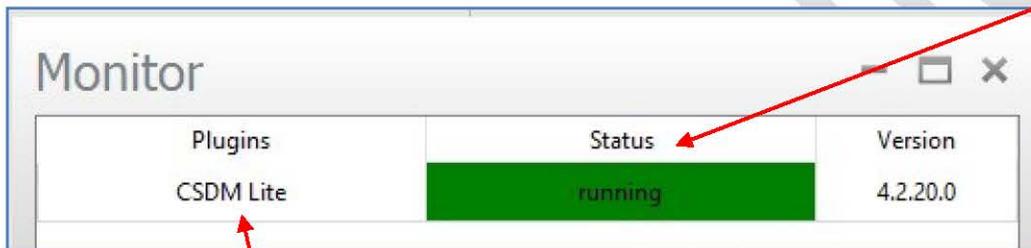


Visualizzazione della posizione della cartella del database

Per visualizzare la posizione della cartella del database corrente, attenersi alla seguente procedura:

Nel pannello "Monitor", fare clic con il tasto sinistro del mouse sulla voce **CSDM Lite**.

Viene visualizzato un pannello di pulsanti fate clic su "Get configuration"


sulla parte destra della finestra viene visualizzata la posizione corrente della cartella del database

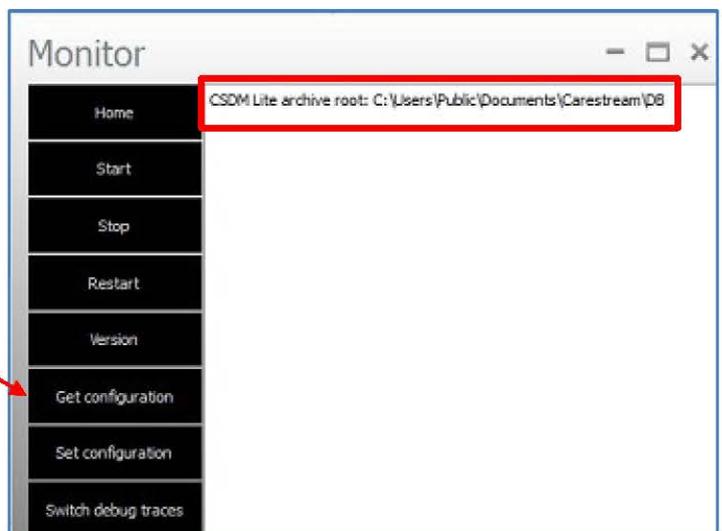


SELEZIONE DI UNA CARTELLA DEL DATABASE DIVERSA (CONFIGURAZIONE CLIENT)

Importante: chiudere CS Imaging prima di effettuare questa modifica!

Nel pannello "Monitor" fare clic su "Set configuration"

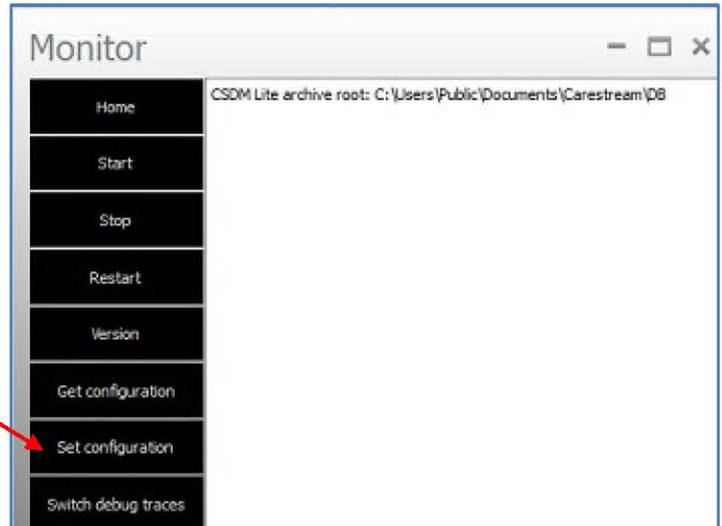

Impostate il percorso in cui si trova il database Carestream (non è importante se con indirizzo IP o nome computer) e fate clic su "Seleziona cartella"

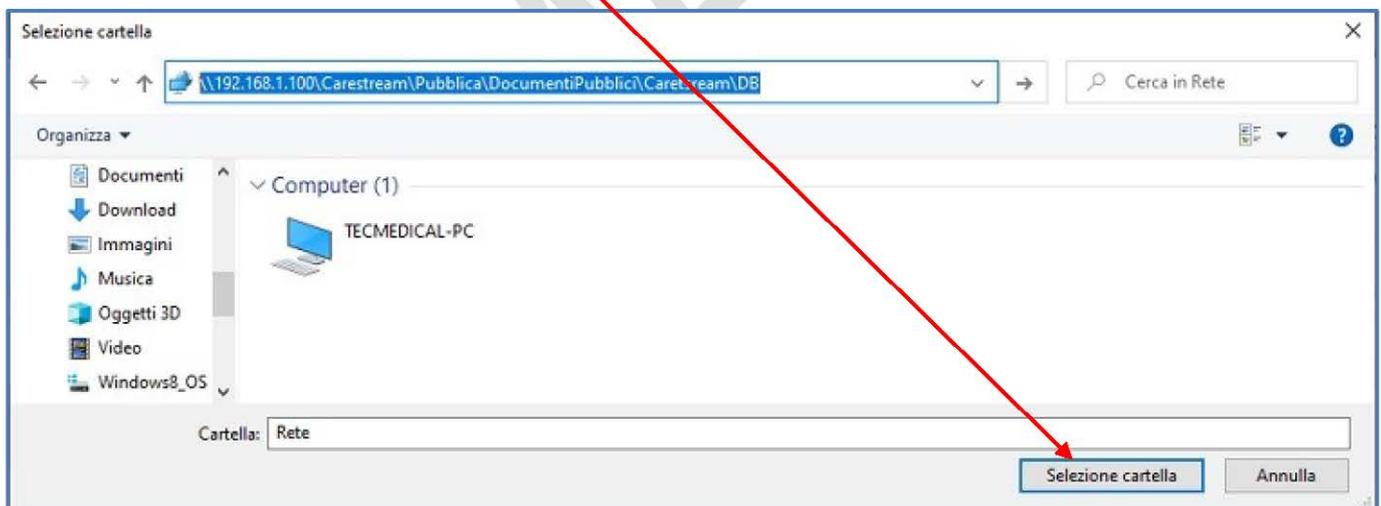

Chiudete "Monitor" e riapritelo per visualizzare in "Get configuration" la memorizzazione del nuovo percorso.

N.B. potrebbe essere necessario riavviare il computer, ma generalmente è sufficiente riaprire CS Imaging e fare un paio di clic con il pulsante sinistro del mouse, non simultanei ma attendendo qualche istante fra l'uno e l'altro, **sull'icona in basso nell'elenco pazienti.**

