


Installazione software CS Imaging – versione 7 - Carestream

VERIFICA DELLA VERSIONE IN USO

Nella necessità di dover reinstallare il software CS Imaging è importante, soprattutto per panoramici 2D/3D e scanner intraorali oppure in caso di utilizzo su più computer del programma, utilizzare la stessa versione. La versione del CS Imaging è visibile in **“Pannello di Controllo>Programmi e funzionalità>”**

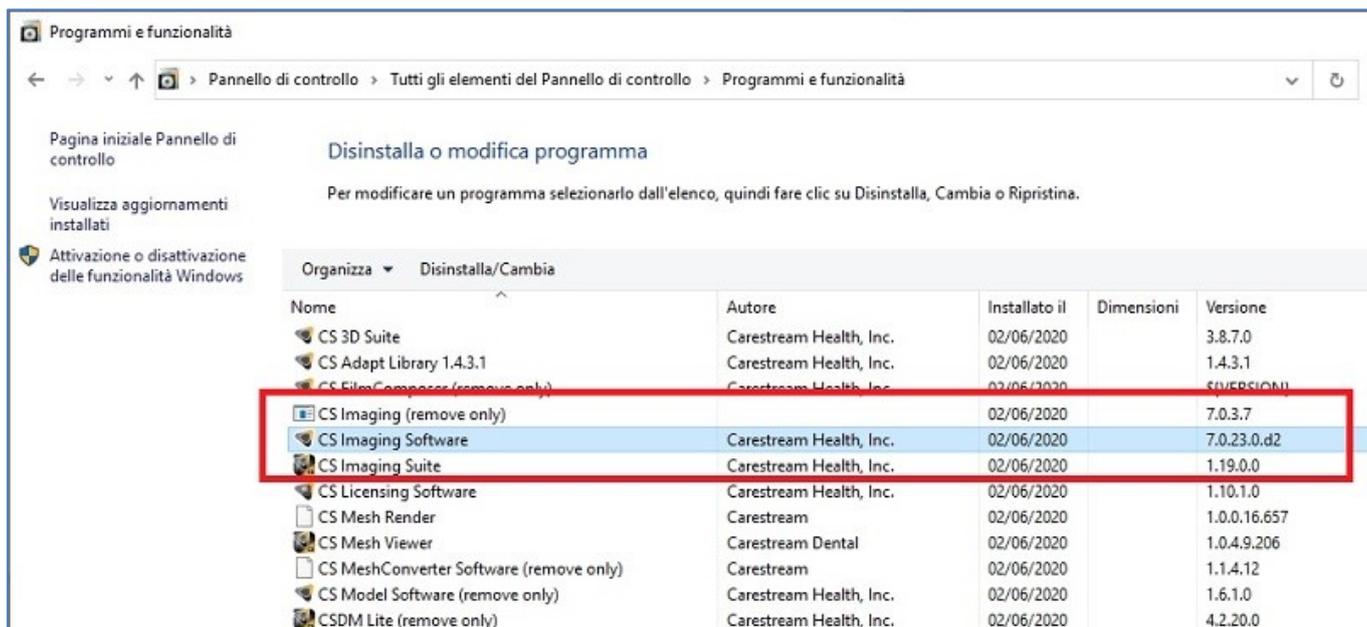

Se non disponete del software è possibile scaricarlo accedendo alla pagina https://www.tecmedical.it/Versione_CSImaging.asp - accedendo all'area riservata (necessita la registrazione)

ATTENZIONE – importante:


- scaricate il file salvandolo sul pc in una cartella di vostra scelta, **non eseguitelo da Internet**
- il file d'installazione è in formato .zip: **estraetelo prima di lanciare il setup**
- **EFFETTUARE UNA COPIA DI BACKUP DEI DATI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE**

Effettuate le procedure sopra descritte, aprite la cartella del software e lanciate il file **CSISuiteSetup.exe**


Apparirà la finestra di scelta della lingua del programma di installazione: scegliete francese o inglese (il programma verrà comunque installato in italiano).




La prima finestra indica la versione del software che state installando, fare clic su “Next”

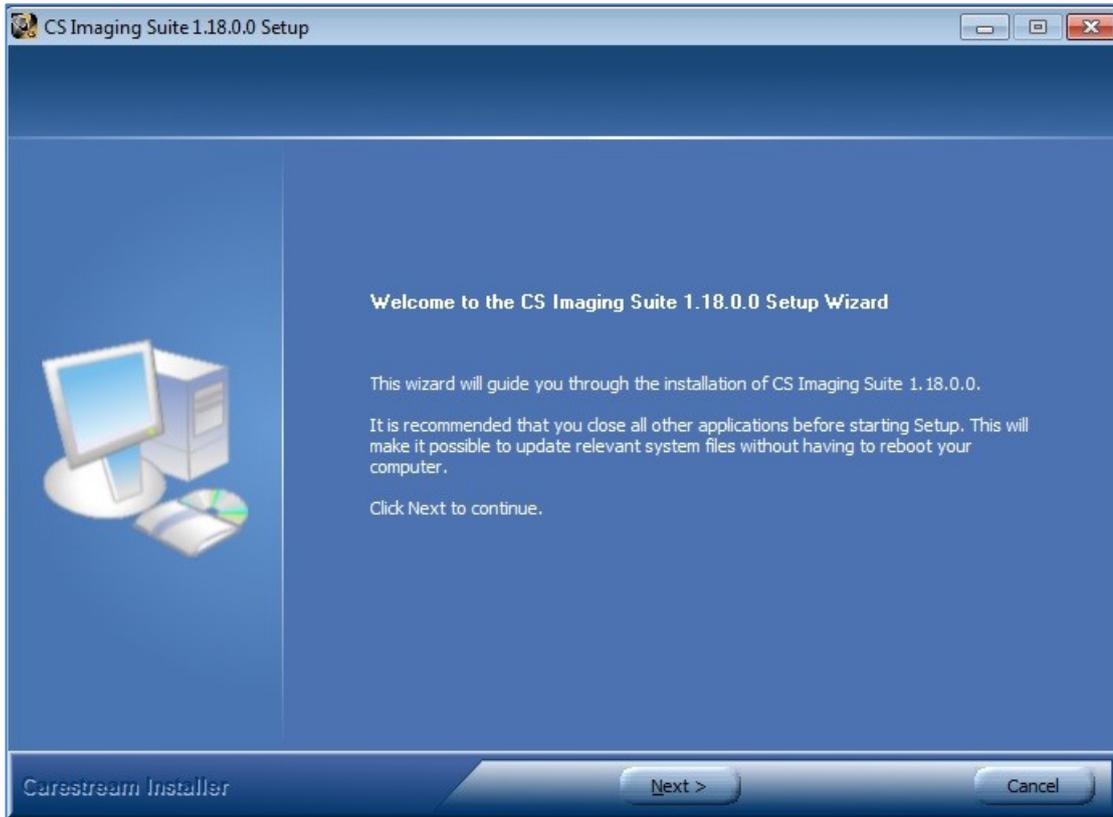


La seconda finestra illustra le condizioni della licenza d’uso, fare clic su “I Agree”

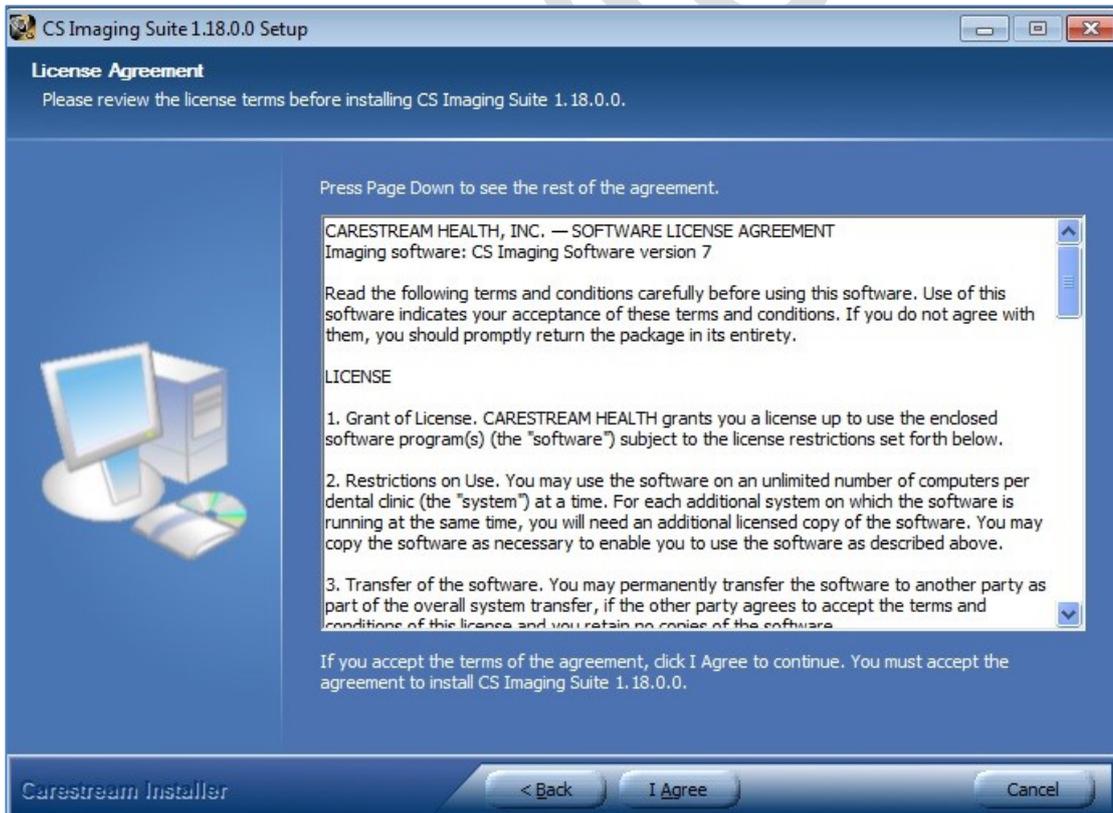


La terza finestra propone il percorso dove sarà installato il software, si consiglia di utilizzare quello indicato e fare clic su **“Next”**

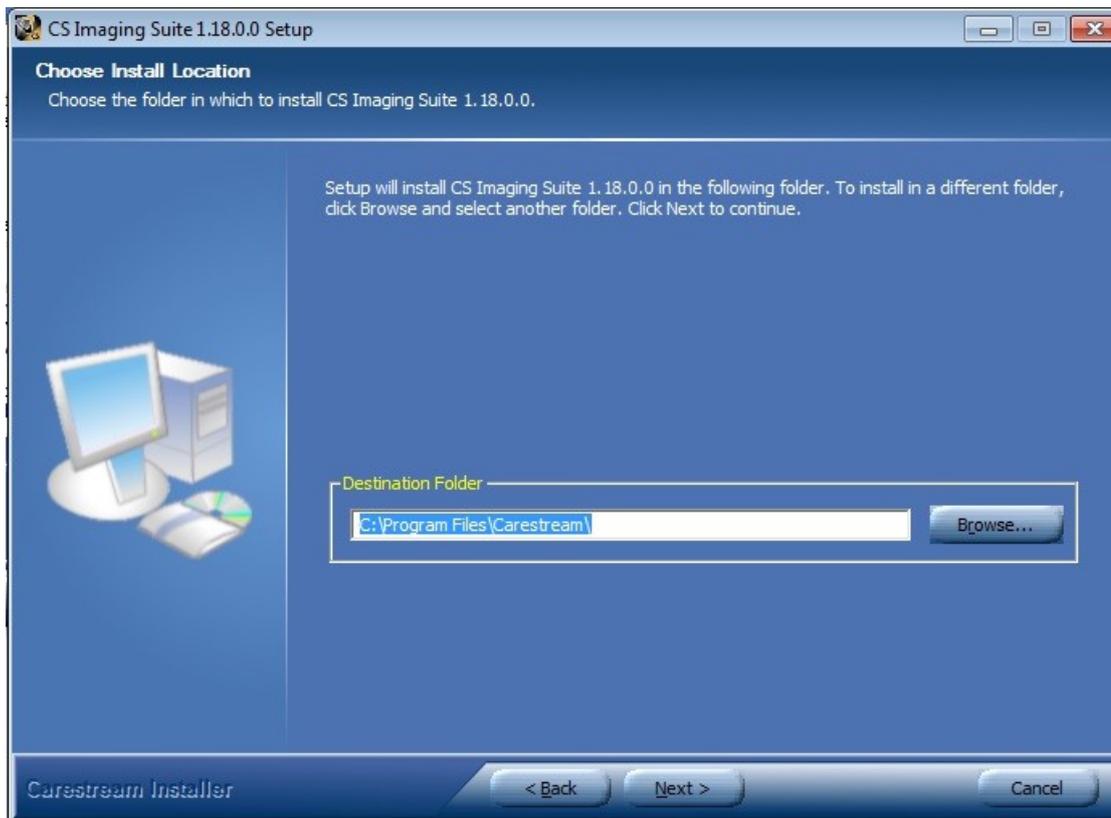

Nella quarta finestra si possono scegliere le opzioni di installazione, nel caso di apparecchi RVG, telecamere, sistemi ai fosfori, scanner intraorali e panoramici 2D proseguire senza selezionare alcuna opzione – clic su **“Next”**

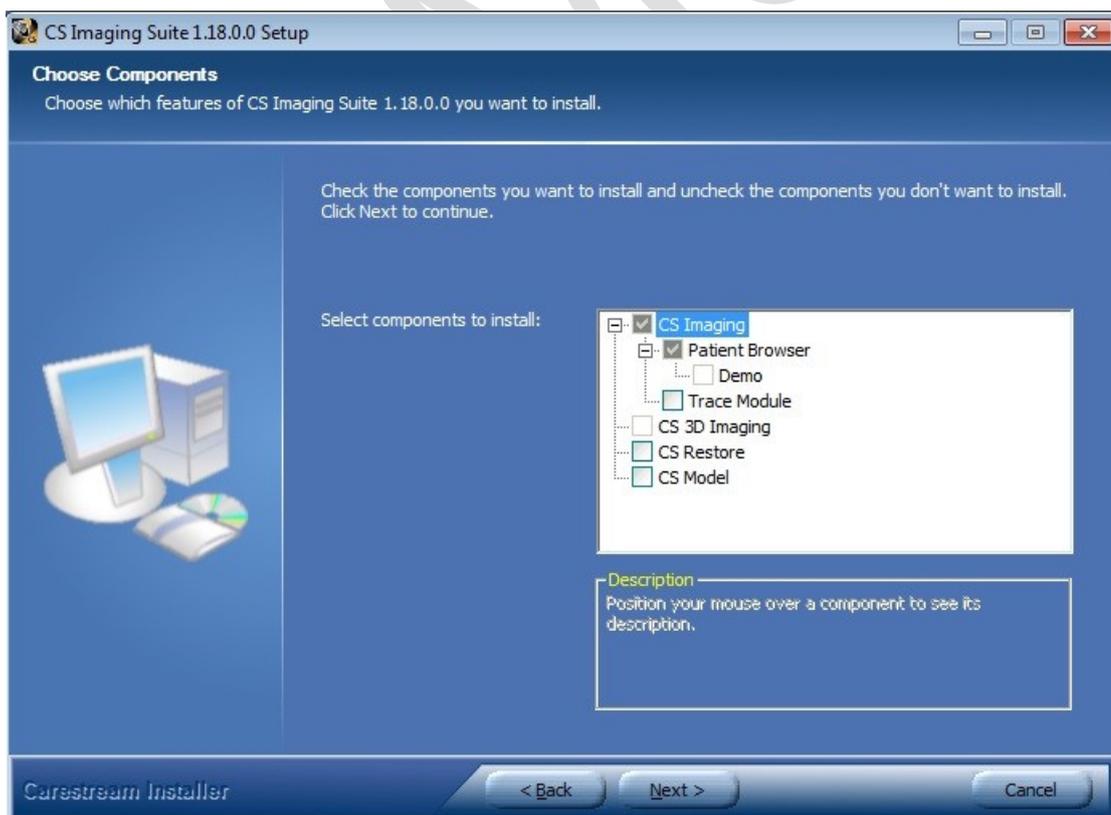


Nel caso si voglia installare il software di visualizzazione 3D, oppure si dispone di una apparecchiature 3D, o panoramici 2D/3D con braccio per acquisizione immagini cefalometriche, oppure software dedicato come, ad esempio, il CS Model selezionare le opzioni desiderate. fare clic su “Next”

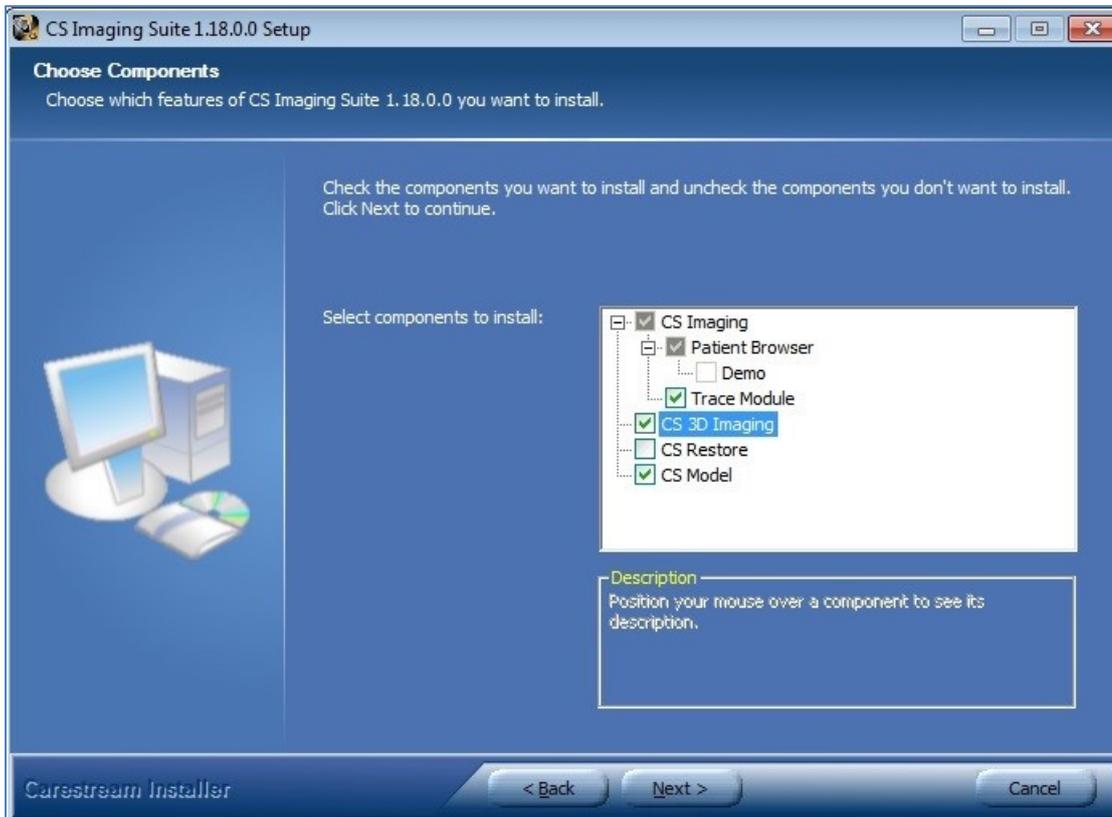


Nella quinta finestra è possibile installare il software affinché utilizzi il database di un gestionale e non il proprio. Lasciare l'opzione su “NO” in quanto il software gestionale, eventualmente, potrà essere configurato separatamente in fase successiva (la procedura può variare in base la gestionale).

Fare clic su “Instal”.

Da questo momento il programma verrà installato.
Il tempo può variare in base alle caratteristiche del computer, generalmente 2/3 minuti

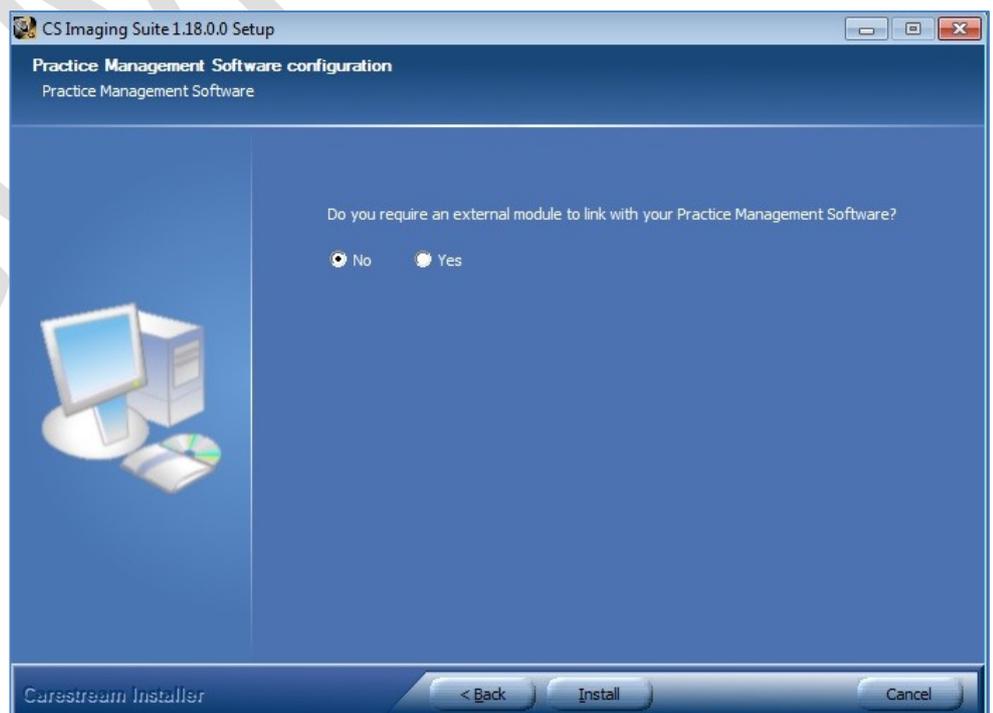

Alla fine appare la finestra di avvenuta installazione, fare clic su “**Finish**” per terminare la procedura.

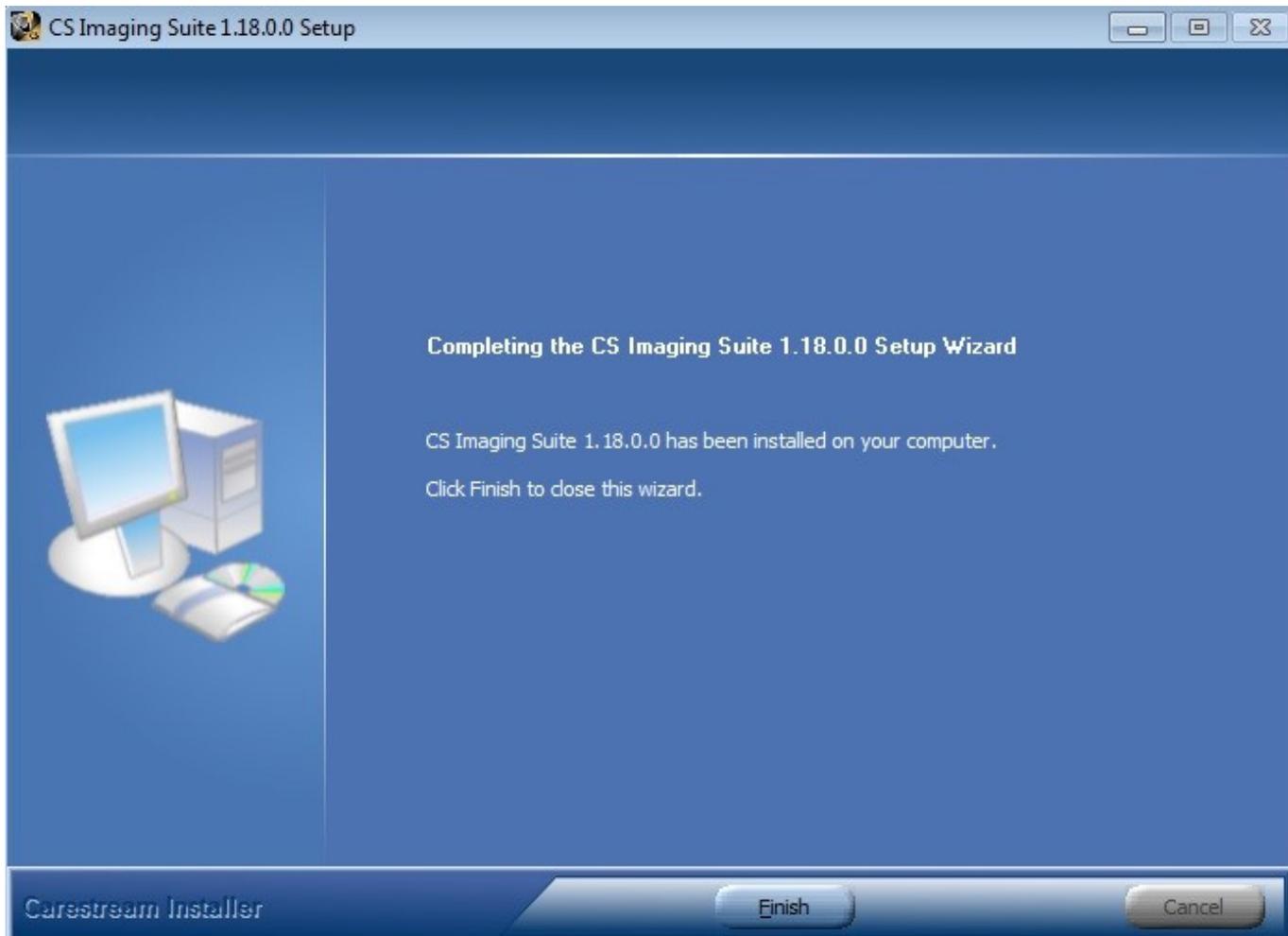

ATTENZIONE:

quando si installa/reinstalla il programma per poter acquisire nuove immagini è necessario effettuare la registrazione (30 giorni di tempo).

Scaricare il manuale dal sito oppure chiamare Carestream al servizio clienti al numero verde: **02 3057 8281**

Non chiamare Tecmedical in quanto non è abilitata alla registrazione delle licenze d'suo del software.