

**Data:** dicembre 2023

**Distribuzione:** Interna Esterna

**Prodotto:** CS Imaging Versione 8

**Autore:** Stéphane Varlet

**N° di riferimento del documento:** PN 00551

**Rivolgersi a:** Stéphane Varlet | stephane.varlet@csdental.com

**Validità:** N/D

CS Imaging versione 8 e aggiornamento IO Scanner Link

## CS Imaging e gli scanner iTero™ sono ora connessi per un flusso di lavoro perfettamente integrato

Carestream Dental è lieta di annunciare che gli scanner intraorali iTero™ sono ora supportati da IO Scanner Link, una soluzione aperta che consente agli utenti di collegare direttamente il software CS Imaging ai principali software di acquisizione degli scanner intraorali.



### Vantaggi principali

- Inserimento manuale dei dati ridotto al minimo e massima efficienza del flusso di lavoro
- Abbinamento semplice e unico per tutti gli scanner
- Accesso centralizzato a tutte le immagini e alle scansioni iTero
- Accesso a una libreria di applicazioni offerte da iTero e Carestream Dental
- Libertà di utilizzare il software e lo scanner intraorale di preferenza

## Come funziona



Richiedere una scansione iTero nel software CS Imaging.

I dettagli del paziente sono inviati all'elenco ordini iTero.

I dettagli del paziente sono compilati automaticamente nell'elenco ordini iTero: senza necessità di reinserimento.

Eseguire la scansione con lo scanner iTero.

Al termine, la scansione viene importata automaticamente in CS Imaging ed è disponibile in pochi minuti.

## Prerequisiti

- Deve essere installato CS Imaging Suite 3.12 / CS Imaging 8.0.25 o versione successiva. Per maggiori informazioni, i clienti devono contattare Carestream Dental o un rappresentante Carestream Dental.
- Profilo iTero configurato: I clienti devono contattare il personale dell'assistenza iTero e richiedere una configurazione del profilo iTero in grado di supportare l'integrazione di CS Imaging.
- Entrambe le workstation CS Imaging e iTero devono avere accesso a Internet.

## Importante

Fare riferimento alla **Guida all'integrazione di CS Imaging e dello scanner iTero** per maggiori informazioni su come:

- Attivare lo scanner iTero in CS Imaging
- Inviare richieste di scansione da CS Imaging
- Recuperare una scansione in CS Imaging

## Promemoria

I produttori di scanner intraorali già integrati con IO Scanner Link e CS Imaging includono **3Disc, Dexis, iTero e Medit**. Per ulteriori dettagli su IO Scanner Link, fare riferimento alle Notizie sui prodotti n. 533 e n. 540

Il software CS Imaging versione 8 si connette ai software di acquisizione di scanner intraorali non sviluppati da Carestream Dental e consente l'invio di scansioni intraorali da software di terze parti a CS Imaging.

Per gli Stati Uniti, l'uso dello scanner iTero Element 5D Plus richiede l'uso di un manicotto protettivo completo e di un coperchio a scatto per le prese d'aria.

© 2023 Carestream Dental LLC.

iTero, il logo iTero, tra gli altri, sono marchi commerciali e/o marchi di servizio di Align Technology, Inc. o di una delle sue filiali o consociate e